


## 利用者状態別選定ポイント

車いすは、屋内で使用する場合と屋外で使用する場合とは、使用される時間や環境が異なるため、選択するポイントが変わってきます。ご使用者の身体状況や介護環境と合わせて、慎重に選定する必要があります。

このマークを目安に選べます

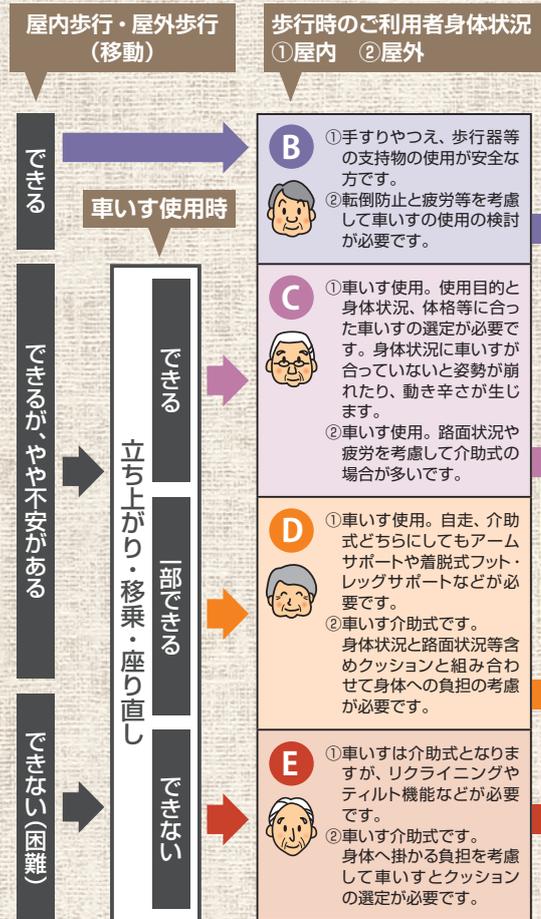

手動車いす			電動車いす			
自走式	介助式	リクライニング式 ティルト式	電動	電動カート		
参照 P.68 ご本人が操作して 駆動させるタイプ	参照 P.68・73 介助者が押して 駆動させるタイプ	参照 P.69・75 リクライニング/ ティルト機能付き	参照 P.77 操作レバーによる 駆動介助者による 操作が可能なタイプも	参照 P.78	参照 P.78	
屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	

## 車いすの名称と機能




## 車いすシーティングについて

利用者様の身体サイズ・身体機能・使用方法・環境などに車いすのサイズ・機能を適合させる(他の福祉用具やクッションなどを併用する場合があります)ことを車いすシーティングといいます。車いすシーティングには一定の知識・技術が必要ですので、専門家にご相談ください。

### 身体寸法と車いす寸法の合わせ方の目安


a 座シート幅	① 座位臀幅に0~3cmを足します。
b 座シート奥行	② 座底長から5~7cm引きます。
c アームサポート高さ	③ 座位肘頭高に1~2cm足します(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。
d フット・レッグサポート長さ	④ 座位下腿長(必要に応じてクッションの厚さを引きます)に合わせます。
e バックサポート高さ	⑤ 座位腋下高から7~10cm引きます(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。
f 前座高	④ 座位下腿長に2~5cm足します(必要に応じてクッションの厚さを引きます)。
g グリップ高さ	介護者のへそ~股関節の高さに合わせます。

#### 車いす寸法

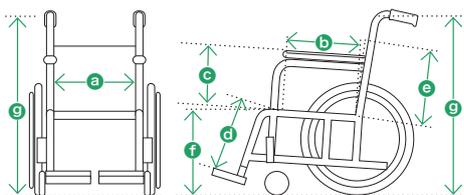

- a 座シート幅
- b 座シート奥行
- c アームサポート高さ
- d フット・レッグサポート長さ
- e バックサポート高さ
- f 前座高
- g グリップ高さ

#### 身体寸法

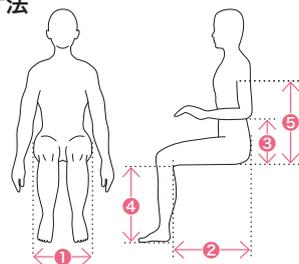

- ① 座位臀幅(ざいでんぷく) …… 臀部の一番広い幅
- ② 座底長(ざていちよう) …… 臀部後端から膝裏までの長さ
- ③ 座位肘頭高(ざいちゅうとうこう) …… 座面から肘までの高さ
- ④ 座位下腿長(ざいかたいちよう) …… 足の裏から膝裏までの高さ
- ⑤ 座位腋下高(ざいあきかこう) …… 座面から腋の下までの高さ

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞処理装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

購入品(入浴)

購入品(入浴)

購入品(入浴)

購入品(入浴)

自然に座れる。生活が広がる。

座るだけで、自然と身体にフィットする  
グラフィットシステム採用

# Gra-Fit

グラフィットシリーズ 車いす



Gra-Fit  
商品説明動画 (LP)



Gra-Fit  
(自動プレーキ付)  
商品説明動画 (LP)

PCS  
オリジナル

用途に  
合わせて選べる

8機種  
(15サイズ)

特殊環境

特殊符号属品

床ずれ防止用

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

## 「GRAVITY」重力 & 「FIT」体に寄り添う

私たち人間は、地球上で生きていく限り、重力の影響からは逃れられません。その重力の影響を受けて崩れていく、高齢者の姿勢、車いすがどのように受け止めていけるのか?どのように適合できるのか?そんな課題と真剣に向き合ってきたのが、「Gra-Fit シリーズ」車いすです!

### 1 シートカラー “クリームゾンレッド”

ガンメタのフレームにクリームゾンレッドのシートを合わせ 男女関係なく使用できるカラーリングにこだわりました。



### 2 タイヤホイール “桜ホイール”

ホイールは桜のカタチをした和モダン型を採用。タイヤには乗り心地の良いノーパンクのエアリーを装着。



### 3 バックサポート “グラフィットシステム”

バックサポートには独自の伸縮式インナーベルトを採用。特別な調整をしなくても座るだけで身体に自然とフィットします。またトップのベルトは工具レスで高さを変えることができますので、より大きな面で背中を支えることができます。  
※1 画像参照



※サポートベルト

## 身体にフィットする 3種のインナーベルト

グラフィットシステム



### 1 背サポートベルト

胸を開いて上半身の曲がり具合を抑え、呼吸をしやすくします。



※1

### 2 腰サポートベルト

インナーベルトを通す位置を調節できます(2cm刻み4段階)。背サポートベルトが肩甲骨のすぐ下になるようにすることで、さらにフィッティングを高め、腕が動かしやすくなります。

### 3 骨盤ベルト

骨盤をしっかりとホールドして、身体を安定させます。



※40cm幅で取得  
※45cm幅についても、JISに準拠して生産しております。  
製造元:日進医療器

## Gra-Fit コンパクトタイプ 多機能(介助式)

## 普通の改札も楽々通れる おでかけ支援モデル

大人気の多機能介助式がさらにコンパクトになって全幅48cmを実現。狭い屋内はもちろん電車の改札も遠回りすることなく楽々通過できます。

通常タイプ  
多機能モデル・介助式  
KZ-212830



座幅  
40cm

全幅56cm

コンパクトタイプ  
KZ-212880



座幅  
40cm

全幅48cm

座幅は通常タイプと同じ40cm。

コンパクト  
全幅48cm

ノーパンク  
タイヤ



## Gra-Fit 多機能低床(自走式)

## 床面をしっかり蹴って 足漕ぎができる 低座面高モデル

低床  
タイプ

ワイド  
45cm幅

ノーパンク  
タイヤ

前座高が36・38・40cmから選べるので下腿長に合わせ一番最適な設定で足漕ぎが可能です。身長の高い方にもオススメです。

Gra-Fit 軽量(自走式/介助式)

軽さ+楽に座れることを追求した  
初めの1台に最適モデル

軽さだけではなくご利用者の方に楽に座って欲しい。そんな思いを込めたモデルです。座り心地の違いを実感下さい。

軽量  
タイプ

ワイド  
45cm幅

ノーパンク  
タイヤ

13.6kg

※40cm幅の場合



11.9kg

※40cm幅の場合



Gra-Fit 多機能(自走式/介助式)

座り心地と介助の  
行いやすさの最適バランス。  
シリーズ中で人気No.1モデル

車いすのメイン機能をほぼ兼ね備えており  
利用者に優しく、介助者にも嬉しい機能の1台です。  
Gra-Fit シリーズの圧倒的センターの位置付です。

ワイド  
45cm幅

ノーパンク  
タイヤ



Gra-Fit (自動ブレーキ付)  
多機能低床(自走式)  
立ち上り自動ブレーキ  
搭載モデル

ブレーキのかけ忘れによる転倒を未然に防ぎます。また人気の多機能低床モデルのため足漕ぎも可能です。

低床  
タイプ

ワイド  
45cm幅

ノーパンク  
タイヤ

車いすから立ちあがるとき

車いすに座るとき

自動的にロック解除



ロック



ロック



自動解除

着座した状態で、  
駆動輪が進行方向に回ると自動的に  
ロックを解除します。

Gra-Fit ティルト&リクライニング(介助式)

軽い力で姿勢を変換できる  
介助負担軽減モデル

驚くほど軽い力でティルト&リクライニングの  
操作が可能になりました。これにより介助者  
の負担が軽減されました。また、押手の高さ  
が変わるのも介助者に大変人気です。

ワイド  
45cm幅

ノーパンク  
ハイポリマー  
タイヤ

ティルト・リクライニング

ティルト機能



バックサポートと座面の  
角度を保ったまま  
後方に傾けられます。

リクライニング  
機能



バックサポート  
だけを後方に傾  
けられます。



足漕ぎしやすい座面高

特殊寝台

特殊着付用品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付用品

スロープ

移動用リフト

自動排処装置

購入品一入浴

購入品一排泄

多機能タイプ

自走式 介助式

Gra-Fit 多機能 (自走式／介助式)

パラマウントベッド

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211830	727800	00170-001363
	45cm幅	KZ-211840	727805	00170-001364
介助式	40cm幅	KZ-212830	728800	00170-001365
	45cm幅	KZ-212840	728805	00170-001366

- 前輪:6インチ ●後輪:自走式/22インチ、介助式/14インチ
- サイズ: KZ-211830/全幅58・座幅40・前座高42・44・46cm、重量 15.9kg  
KZ-211840/全幅63・座幅45・前座高42・44・46cm、重量 16kg  
KZ-212830/全幅56・座幅40・前座高42・44・46cm、重量 14.4kg  
KZ-212840/全幅62・座幅45・前座高42・44・46cm、重量 14.7kg
- シート奥行: KZ-211830・KZ-212830/38cm、KZ-211840・KZ-212840/40cm
- 折りたたみ幅: 自走式/33cm、介助式/31cm
- 最大使用者体重: KZ-211830・KZ-212830/100kg  
KZ-211840・KZ-212840/120kg

多機能なアームサポート・フットサポートを搭載することで、さらに座りやすく、移乗のしやすさにも配慮しています

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅			
自走式	45cm幅			
介助式	40cm幅			
介助式	45cm幅			

非課税 非課税 非課税 非課税

●オプション…ボンベ架、回転式転倒防止装置、IVボールセット、エレベーターユニット、ワンストップブレーキ(介助式はボンベ架との併用不可)、ブラバックルベルト、延長棒(+8cm)、杖入れ

PCS オリジナル




- エアリー 3Dシート クッション標準装備 スイングイン/アウト
- カバー付キャスター アンカーフレーム 楽々介助ブレーキ グラフィットシステム

桜ホイール

ノーバンクタイヤ

ワイド45cm幅

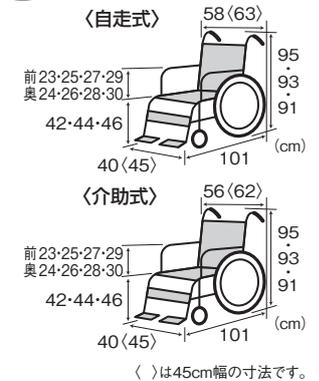

多機能タイプ／低床タイプ

自走式

Gra-Fit 多機能 低床 (自走式)

パラマウントベッド

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211860	727810	00170-001367
	45cm幅	KZ-211870	727815	00170-001368

- 前輪:5インチ ●後輪:20インチ
- サイズ: KZ-211860/全幅58・座幅40・前座高36・38・40cm、重量 15.4kg  
KZ-211870/全幅63・座幅45・前座高36・38・40cm、重量 15.4kg
- シート奥行: KZ-211860/38cm、KZ-211870/40cm
- 折りたたみ幅: 34cm
- 最大使用者体重: KZ-211860/100kg  
KZ-211870/120kg

足こぎしやすい 座面高36・38・40cm!

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅			
自走式	45cm幅			

非課税 非課税

●オプション…ボンベ架、回転式転倒防止装置、IVボールセット、エレベーターユニット、ワンストップブレーキ、ブラバックルベルト、延長棒(+8cm)、杖入れ


PCS オリジナル



- エアリー 3Dシート クッション標準装備 スイングイン/アウト
- カバー付キャスター アンカーフレーム 楽々介助ブレーキ グラフィットシステム

低床タイプ

ワイド45cm幅

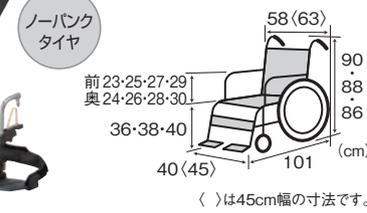

**おすすめポイント**

**Gra-Fit 多機能タイプ**

**フット・レッグサポート**

ロックレバー

高さ調節は工具不要!!

工具を使用せずにフットプレートの高さを調節できます。またフットプレートをスライドさせて2cm引き込むことも可能です。

軽量タイプ

自走式 介助式

Gra-Fit 軽量 (自走式／介助式)

パラマウントベッド

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211800	727790	00170-001359
	45cm幅	KZ-211810	727795	00170-001360
介助式	40cm幅	KZ-212800	728790	00170-001361
	45cm幅	KZ-212810	728795	00170-001362

- 前輪:6インチ ●後輪:自走式/22インチ、介助式/14インチ
- サイズ: KZ-211800/全幅58・座幅40・前座高42cm、重量 13.6kg  
KZ-211810/全幅63・座幅45・前座高42cm、重量 13.8kg  
KZ-212800/全幅59・座幅40・前座高42cm、重量 11.9kg  
KZ-212810/全幅64・座幅45・前座高42cm、重量 12kg
- シート奥行: KZ-211800・KZ-212800/38cm、KZ-211810・KZ-212810/40cm
- 折りたたみ幅: 自走式/32cm、介助式/33cm
- 最大使用者体重: KZ-211800・KZ-212800/100kg  
KZ-211810・KZ-212810/120kg

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅			
自走式	45cm幅			
介助式	40cm幅			
介助式	45cm幅			

非課税 非課税 非課税 非課税

●オプション…ボンベ架(自走式のみ)、回転式転倒防止装置(自走式のみ)、IVボールセット、ブラバックルベルト、延長棒(+8cm)(自走式のみ)、杖入れ

PCS オリジナル




- エアリー 3Dシート クッション標準装備
- カバー付キャスター アンカーフレーム 楽々介助ブレーキ グラフィットシステム

ノーバンクタイヤ

軽量タイプ

ワイド45cm幅

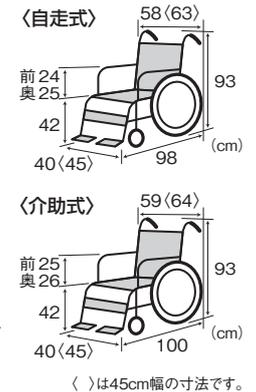

軽くて使いやすいスタンダードモデル!


※軽量スタンダードモデルでは、フットプレートの高さ調節に工具が必要です。

多機能タイプ／低床タイプ／自動ブレーキ付

Gra-Fit (自動ブレーキ付) 多機能 低床 (自走式)

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211865	727820	00170-001506
	45cm幅	KZ-211875	727825	00170-001507

- 前輪：5インチ ●後輪：20インチ
- サイズ：KZ-211865／全幅58・座幅40・前座高36・38・40cm、重量18.2kg  
KZ-211875／全幅63・座幅45・前座高36・38・40cm、重量18.2kg
- シート奥行：KZ-211865／38cm  
KZ-211875／40cm
- 折りたたみ幅：34cm
- 最大使用者体重：KZ-211865／100kg  
KZ-211875／120kg

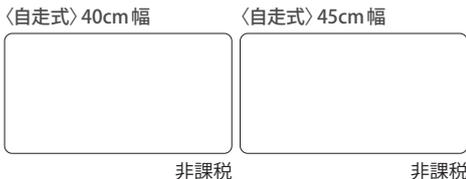

●オプション…ボンベ架、回転式転倒防止装置、IVポールセット、エレベーターユニット、ブラバックルベルト、延長棒(+8cm)、杖入れ


〔自走式〕

パラマウントベッド

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				

- PCS オリジナル
- エアリー
- 3D シート
- クッション標準装備
- スイングイン・アウト
- カバー付キャスター
- アンカーフレーム
- 楽々介助ブレーキ
- グラフィックシステム
- ノーパンクタイヤ
- 低床タイプ
- ワイド45cm幅

ブレーキのかけ忘れにも安心!

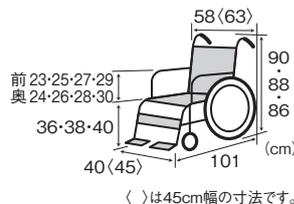

Gra-Fit (自動ブレーキ付) 商品説明動画 (LP)

多機能タイプ／コンパクトタイプ

Gra-Fit 多機能 コンパクト (介助式)

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
介助式	40cm幅	KZ-212880	727860	00170-001654

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅48・座幅40・前座高42・44・46cm
- 重量：14kg
- シート奥行：38cm ●折りたたみ幅：31cm
- 最大使用者体重：100kg



普通の改札も楽々通れる!!  
おでかけや  
旅行にも便利!




●オプション…回転式転倒防止装置、エレベーターユニット、ブラバックルベルト、杖入れ

〔介助式〕

パラマウントベッド

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				

- PCS オリジナル
- エアリー
- 3D シート
- クッション標準装備
- スイングイン・アウト
- カバー付キャスター
- アンカーフレーム
- 楽々介助ブレーキ
- グラフィックシステム
- ノーパンクタイヤ
- コンパクト全幅48cm

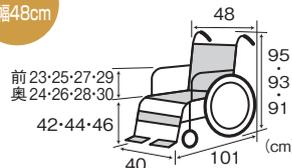

小桜ホイール

リクライニング／ティルト

Gra-Fit ティルト&リクライニング

座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	KZ-214830	730317	00170-001569
45cm幅	KZ-214840	730318	00170-001570

- 前輪：6インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：KZ-214830／全幅54・座幅40・前座高45cm、重量21kg  
KZ-214840／全幅59・座幅45・前座高45cm、重量21.5kg
- 折りたたみ幅：KZ-214830／54cm  
KZ-214840／59cm
- シート奥行：KZ-214830／40cm  
KZ-214840／42cm
- 最大使用者体重：KZ-214830／100kg  
KZ-214840／120kg



介助者の身長などに合わせて角度が変えられる「手押しハンドル」



●オプション…IVポールセットTR用、エレベーターユニット(フットプレート角度可変タイプ)、ブラバックルベルト


〔リクライニング・ティルト式〕

パラマウントベッド

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	落とし込み				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				

- PCS オリジナル
- 3D シート
- クッション標準装備
- スイングイン・アウト
- カバー付キャスター
- アンカーフレーム
- 楽々介助ブレーキ
- グラフィックシステム
- 足踏みブレーキ
- ノーパンクハイポリマータイヤ
- ワイド45cm幅

軽い力でらくらく♪

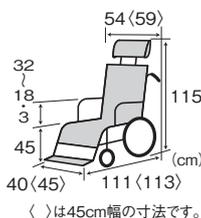

ティルト角度 0~30°

リクライニング 90~120°

ハンドル高さ 105~130cm

Gra-Fit ティルト&リクライニング 商品説明動画 (LP)

多機能タイプ

自走式

BAL-R3 (自走式)

ミキ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード  
**727882**

TAISコード  
00122-000680

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅60・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 13.9kg ●折りたたみ幅: 34cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

移乗の際にとても有効な装備を備えた車いすです



ノーバンクタイヤ

- オプション  
エレベーターユニット、ウイング用ボンベ架、キャスタラック取付用点滴棒ホルダー(前方用)、後方用点滴棒用ホルダー、延長棒(+10cm)(+5cm)

非課税

標準タイプ

自走式

BAL-R1 (自走式)

ミキ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード  
**727881**

TAISコード  
00122-000678

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅60・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 12.3kg ●折りたたみ幅: 32.5cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

操作がしやすくシンプルな装備を備えた軽量なアルミ車いす



ノーバンクタイヤ

- オプション  
専用転倒防止バー付ボンベ架(右取付のみ)、キャスタラック取付用点滴棒ホルダー(前方用)、後方用点滴棒用ホルダー、延長棒(+10cm)(+5cm)

非課税

多機能タイプ

自走式

NEO-1βW (自走式)

日進医療器

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード  
**727880**

TAISコード  
00175-000421

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅58・座幅40・前座高43cm
- 重量: 13.4kg ●折りたたみ幅: 32cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

押し手90cmでらくらく介助の多機能タイプ



スイングアウト

ノーバンクタイヤ

押しやすいグリップ形状

- オプション  
ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラバックルベルト、ガートル掛け、延長棒

非課税

標準タイプ

自走式

NEO-1β (自走式)

日進医療器

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード  
**727879**

TAISコード  
00175-000420

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅63・座幅40・前座高43cm
- 重量: 12.3kg ●折りたたみ幅: 32cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

押し手91cmでらくらく介助!



ノーバンクタイヤ

押しやすいグリップ形状

- オプション  
ワンストップブレーキ、ブラバックルベルト、ガートル掛け、延長棒

非課税

標準タイプ

自走式

ステイヤー (自走) SY22-40SB

カワムラサイクル

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード  
**727861**

TAISコード  
00160-000326

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅60・座幅40・前座高43cm
- 重量: 13.2kg
- 折りたたみ幅: 33cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg



ノーバンクタイヤ

非課税

在庫限定

ミント


- オプション...ガートル掛け、ボンベ架、延長棒(+20cm)、延長棒(+10cm)

お客様の声から生まれたアルコール濃度80%までの耐久性シートを持つ車いすです

希釈した次亜塩素酸ナトリウムでのお手入れも可能です

こんな方におすすめ

- 主に施設内で使用する場合
- 不特定多数の方が使用する場合
- 初めて車いすを使用する方
- 旅行や通院など短期間、短時間で使われる方

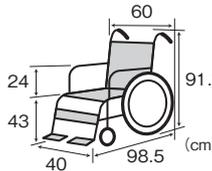

多機能タイプ 自走式

カルティマ スーパーグレード多機能 (自走) ミキ


座幅	型式	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
40cm幅	CRT-SG-7	727875	00122-000671	A B C D E	A B C D E
42cm幅		727876		A B C D E	A B C D E

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・57cm  
座幅40・42cm  
前座高43.5cm
- 重量：12.2kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

ノーバンク  
タイヤ

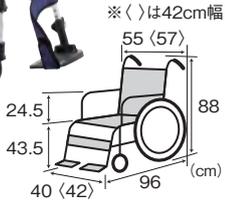

ネイビー  
非課税

標準タイプ 自走式

カルティマ スーパーグレード標準 (自走) ミキ


座幅	型式	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
40cm幅	CRT-SG-5	727873	00122-000669	A B C D E	A B C D E
42cm幅		727874		A B C D E	A B C D E

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・57cm  
座幅40・42cm  
前座高43.5cm
- 重量：11.1kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

ノーバンク  
タイヤ

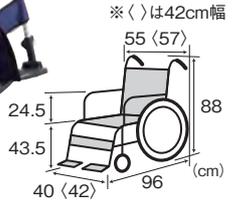

ネイビー  
非課税

多機能タイプ 自走式

カルッタ スーパーグレード多機能 (自走) ミキ


型式	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
CRT-SG-3	727878	00122-000667	A B C D E	A B C D E

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・座幅40cm  
前座高43.5cm
- 重量：11.7kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

ノーバンク  
タイヤ

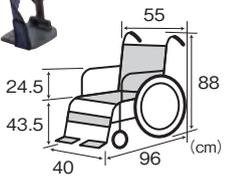

ネイビー  
非課税

標準タイプ 自走式

カルッタ スーパーグレード標準 (自走) ミキ


型式	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
CRT-SG-1	727877	00122-000665	A B C D E	A B C D E

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・座幅40cm  
前座高43.5cm
- 重量：10.6kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

ノーバンク  
タイヤ

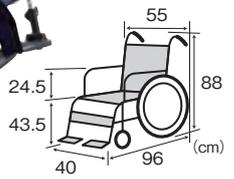

ネイビー  
非課税

おすすめポイント CRT-SGシリーズ

ワンタッチ式  
ステップ  
工具なしで誰でも簡単に  
高さ調節可能です！



ワンタッチキャスター

工具なしで簡単お手入れ！いつも清潔な状態でご使用できます！



多機能タイプ 自走式

エアフィッツ・プレミアム ミキ


型式	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
AFP-22	727857	00122-000653	A B C D E	A B C D E

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅61・座幅40cm  
前座高46・48・50cm
- 重量：19.7kg
- 折りたたみ幅：37cm
- シート奥行：38・44cm
- 最大使用者体重：100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

ノーバンク  
タイヤ

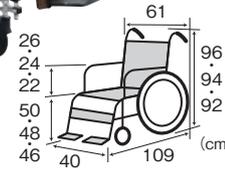

キャメル  
非課税

多機能タイプ 自走式

エアフィッツ・スタンダード ミキ


型式	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
AFS-22	727856	00122-000655	A B C D E	A B C D E

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅60cm  
座幅40cm  
前座高48cm
- 重量：17.2kg
- 折りたたみ幅：32.5cm
- シート奥行：42cm
- 最大使用者体重：100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

ノーバンク  
タイヤ

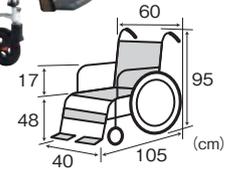

キャメル  
非課税

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊着付用品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥籠掛鐘設置

購入品一入浴

購入品二排泄

標準タイプ

自走式

グレイスコア標準 (自走)  
GRC-11B

松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727770	00066-000399
42cm幅	727775	

ノーバンク  
タイヤ


- 前輪:5インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅56.5・58.5cm  
座幅40・42・前座高43cm
- 重量:14.7kg ●折りたたみ幅:32.5cm
- シート奥行:38cm ※38/34cmに設定可能
- 最大使用者体重:100kg
- クッション厚:5cm



非課税

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

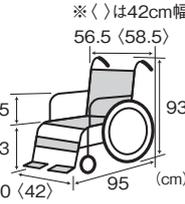

Grace Coreシリーズ オプション…後方ガートル架セット、ボンペ架、杖入れ、延長棒(+10cm)

多機能タイプ

自走式

グレイスコア マルチ (自走)  
GRC-31B

松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727780	00066-000401
42cm幅	727785	

ノーバンク  
タイヤ


- 前輪:5インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高43cm
- 重量:16.5kg ●折りたたみ幅:32.5cm
- シート奥行:38cm
- ※38/34cmに設定可能
- 最大使用者体重:100kg
- クッション厚:5cm



非課税

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

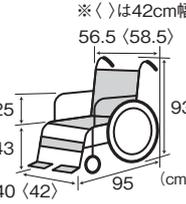

多機能タイプ

自走式

グレイスコア アジャスト (自走)  
GRC-51B

松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727858	00066-000409
42cm幅	727859	

ノーバンク  
タイヤ


- 前輪:5インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高41・43・45cm
- 重量:17.1kg ●折りたたみ幅:32cm
- シート奥行:38cm
- ※38/34cmに設定可能
- 最大使用者体重:100kg
- クッション厚:5cm



非課税

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

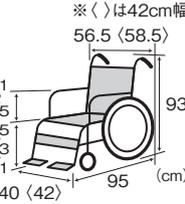

多機能タイプ/低床タイプ

自走式

グレイスコア ミニモ (自走)  
GRC-50B

松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727871	00066-000419
42cm幅	727872	

ノーバンク  
タイヤ


- 前輪:5インチ ●後輪:20インチ
- サイズ:全幅56.5・58.5・座幅40・42cm  
前座高35・37・(※39)cm
- 重量:16.8kg
- 折りたたみ幅:33cm
- シート奥行:32・36cm
- 最大使用者体重:100kg



非課税

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

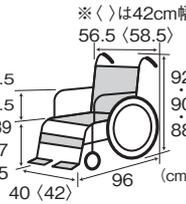

6輪車タイプ

自走式

ULTRA 6輪車 (自走) NA-U6 ハイポリマー仕様 日進医療器

座幅	カラー	商品コード
40cm幅	インディゴ	726860
	ワイン	726865

- 3Dシート
- クッション 厚手装填
- スイング インアウト
- カバー付 キャスター
- アンカー フレーム
- 色々補助 フレーキ

TAISコード 00175-000360


- 前輪:5インチ ●後輪:20インチ
- サイズ:全幅58・座幅40cm  
前座高38・40・42cm
- 重量:14.7kg
- 折りたたみ幅:32cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg



非課税

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

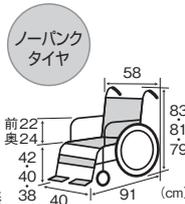

●オプション…エレベーターユニット、ブラッックベルト、ブレーキ延長棒

モジュールタイプ

自走式

ULTRA モジュール (自走) NA-U7 エアリー仕様 日進医療器

座幅	カラー	商品コード
40~44cm幅	インディゴ	726870
	ワイン	726875

- エアリー
- 3Dシート
- クッション 厚手装填
- スイング インアウト
- カバー付 キャスター
- 色々補助 フレーキ

TAISコード 00175-000361


- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅57・59・61・座幅40・42・44cm  
前座高40・42・44cm
- 重量:15.2kg ●折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg



非課税

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

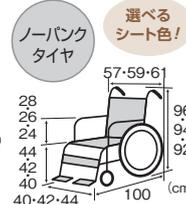

●オプション…ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラッックベルト、ボンペ架、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

6輪車タイプ

自走式

ネクストコア・くるり  
NEXT-70B (自走)

松永製作所

商品コード	TAISコード
726760	00066-000335

幅90cmの廊下も  
くるりと回れる  
超コンパクト  
6輪車いす


- 前輪:4インチ ●後輪:20インチ
- サイズ:全幅58・座幅40cm  
前座高36.5・38.5・40.5cm
- 重量:18.5kg
- 折りたたみ幅:34cm
- シート奥行:36cm
- 最大使用者体重:100kg



非課税

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

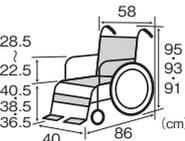

幅広タイプ/モジュールタイプ

自走式

KJP-5 ミキ

ビッグ 最大使用者体重 130kg

商品コード	TAISコード
726995	00122-000617

ノーバンク  
タイヤ


- 前輪:8インチ ●後輪:24インチ
- サイズ:全幅66・68・70cm  
座幅48・50・52cm  
前座高48・50・52cm
- 重量:21kg
- 折りたたみ幅:34cm
- シート奥行:40cm
- 最大使用者体重:130kg



非課税

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

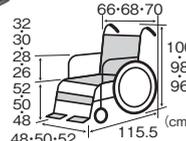

多機能タイプ (介助式)

BAL-R4 (介助式)

ミキ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード 728882 TAISコード 00122-000681

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅54.5・座幅40・前座高46cm
- 重量：12.3kg ●折りたたみ幅：26.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

移乗の際にとても有効な装備を備えた車いすです



ノーバンクタイヤ

- オプション  
エレベーターユニット、ウイング用ボンベ架、キャストラック取付用点滴棒ホルダー（前方用）、後方用点滴棒用ホルダー、延長棒(+10cm)(+5cm)

非課税

標準タイプ (介助式)

BAL-R2 (介助式)

ミキ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード 728881 TAISコード 00122-000679

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量：10.8kg ●折りたたみ幅：26.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

操作がしやすくシンプルな装備を備えた軽量なアルミ車いす



ノーバンクタイヤ

- オプション  
ボンベ架(BAL-R2用)、キャストラック取付用点滴棒ホルダー（前方用）、後方用点滴棒用ホルダー、延長棒(+10cm)(+5cm)

非課税

多機能タイプ (介助式)

NEO-2βW (介助式)

日進医療器

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード 728880 TAISコード 00175-000423

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅53・座幅40・前座高43cm
- 重量：12.8kg ●折りたたみ幅：26cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

押し手90cmでらくらく介助の多機能タイプ



押しやすいグリップ形状



スイングアウト

ノーバンクタイヤ

- オプション  
ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラバックルベルト、ガートル掛け、延長棒

非課税

標準タイプ (介助式)

NEO-2β (介助式)

日進医療器

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード 728879 TAISコード 00175-000422

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅59・座幅40・前座高43cm
- 重量：11.3kg ●折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

押し手91cmでらくらく介助!



押しやすいグリップ形状



ノーバンクタイヤ

- オプション  
ワンストップブレーキ、ブラバックルベルト、ガートル掛け、延長棒

非課税

標準タイプ

ステイヤー (介助) SY16-40SB

カワムラサイクル

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード 728865 TAISコード 00160-000329

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅56・座幅40・前座高43cm
- 重量：12.1kg
- 折りたたみ幅：29cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーバンクタイヤ

非課税

在庫限定




お客様の声から生まれたアルコール濃度80%までの耐性シートを持つ車いすです

希釈した次亜塩素酸ナトリウムでのお手入れも可能です

こんな方におすすめ

- 主に施設内で使用する場合
- 不特定多数の方が使用する場合
- 初めて車いすを使用する方
- 旅行や通院など短時間、短時間で使用される方

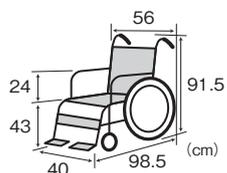

- オプション…ガートル掛け、ボンベ架、延長棒(+20cm)、延長棒(+10cm)

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞処理装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

多機能タイプ

介助式

カルティマ スーパーグレード多機能(介助) ミキ

座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	CRT-SG-8	728875	00122-000672
42cm幅		728876	


- 前輪:6インチ ●後輪:14インチ
- サイズ:全幅49・51cm  
座幅40・42cm  
前座高43.5cm
- 重量:11.7kg
- 折りたたみ幅:27cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg



ネイビー

非課税

- 屋内 A B C D E
- 屋外 A B C D E
- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

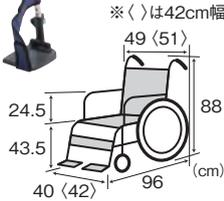

多機能タイプ

介助式

カルッタ スーパーグレード 多機能(介助) ミキ

型式	商品コード	TAISコード
CRT-SG-4	728878	00122-000668


- 前輪:6インチ ●後輪:14インチ
- サイズ:全幅49・座幅40cm  
前座高43.5cm
- 重量:11.3kg
- 折りたたみ幅:27cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg



ネイビー

非課税

- 屋内 A B C D E
- 屋外 A B C D E
- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

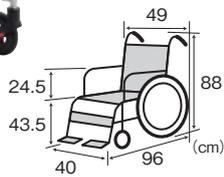

標準タイプ

介助式

カルティマ スーパーグレード標準(介助) ミキ

座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	CRT-SG-6	728873	00122-000670
42cm幅		728874	


- 前輪:6インチ ●後輪:14インチ
- サイズ:全幅49・51cm  
座幅40・42cm  
前座高43.5cm
- 重量:10.5kg
- 折りたたみ幅:27cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg



ネイビー

非課税

- 屋内 A B C D E
- 屋外 A B C D E
- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

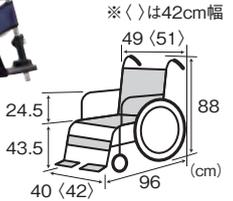

標準タイプ

介助式

カルッタ スーパーグレード 標準(介助) ミキ

型式	商品コード	TAISコード
CRT-SG-2	728877	00122-000666


- 前輪:6インチ ●後輪:14インチ
- サイズ:全幅49・座幅40cm  
前座高43.5cm
- 重量:10.1kg
- 折りたたみ幅:27cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg



ネイビー

非課税

- 屋内 A B C D E
- 屋外 A B C D E
- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

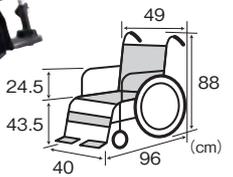

多機能タイプ

介助式

エアフィッツ・プレミアム AFP-16 ミキ

商品コード	TAISコード
728862	00122-000654

- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅56.5・座幅40cm  
前座高46・48・50cm
- 重量:18.4kg
- 折りたたみ幅:31cm
- シート奥行:38・44cm
- 最大使用者体重:100kg


※エアフィッツの前座高はクッション込みのサイズです。



キャメル

非課税

- 屋内 A B C D E
- 屋外 A B C D E
- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

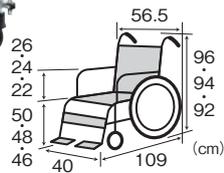

多機能タイプ

介助式

エアフィッツ・スタンダード AFS-16 ミキ

商品コード	TAISコード
728861	00122-000656

- 前輪:6インチ
- 後輪:16インチ
- サイズ:全幅54cm  
座幅40cm  
前座高48cm
- 重量:15.7kg
- 折りたたみ幅:28.5cm
- シート奥行:42cm
- 最大使用者体重:100kg


※エアフィッツの前座高はクッション込みのサイズです。



キャメル

非課税

- 屋内 A B C D E
- 屋外 A B C D E
- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

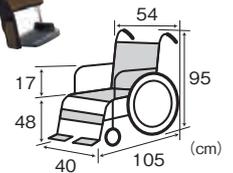

おすすめポイント エアフィッツシリーズ

**空気圧で調整する「ナチュラルシーティング」**  
腰掛けて座面・背面クッションの内圧を調整、体重や体型に応じた良好な座位姿勢を簡単に整えます。



**エアセルクッション(座)**

座っている時の支えとなる坐骨の減圧、お尻全体の圧の分散が骨盤のバランスと安定を保ち、前ずれすることや斜めに座ることを防ぎます。また、大腿部の支えにより下肢が安定することで、上半身の安定も保てます。


**エアセルクッション(背)**

骨盤と体の側面を左右からサポートすることで、体幹の傾きやネジレを抑制し、斜めに座ることを防ぎます。背中全体で体重を支えるようになるため坐骨の圧も軽減できます。また、お尻後部の隙間を埋めて、背中の接触面積を増やすことで骨盤の後傾を抑制し、背中が丸まり前ずれすることを防ぎます。

**標準タイプ** 介助式  
**グレイスコア標準 (介助)**  
**GRC-21BD** 松永製作所

屋内	A B C D E	アームサポート	高さ調整
屋内	A B C D E	アームサポート	跳ね上げ
屋外	A B C D E	フットレグサポート	着脱
屋外	A B C D E	フットレグサポート	スイングアウト
座幅	商品コード	バックサポート	張り調整
40cm幅	728770	座シート	奥行調整
42cm幅	728775		

※〈〉は42cm幅  
 TAISコード 00066-000403  
 ●前輪：5インチ ●後輪：16インチ  
 ●サイズ：全幅56.5・58.5cm  
 座幅40・42cm  
 前座高43cm  
 ●重量：14.4kg  
 ●折りたたみ幅：32cm  
 ●シート奥行：38cm  
 ※38/34cmに設定可能  
 ●最大使用者体重：100kg  
 ●クッション厚：5cm

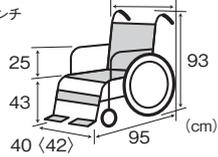

ノーバンク  
タイヤ  
足踏み  
ブレーキ




●オプション…延長棒(+10cm)

**多機能タイプ** 介助式  
**グレイスコア マルチ (介助)**  
**GRC-41BD** 松永製作所

屋内	A B C D E	アームサポート	高さ調整
屋内	A B C D E	アームサポート	跳ね上げ
屋外	A B C D E	フットレグサポート	着脱
屋外	A B C D E	フットレグサポート	スイングアウト
座幅	商品コード	バックサポート	張り調整
40cm幅	728780	座シート	奥行調整
42cm幅	728785		

※〈〉は42cm幅  
 TAISコード 00066-000404  
 ●前輪：5インチ ●後輪：16インチ  
 ●サイズ：全幅56.5・58.5cm  
 座幅40・42cm  
 前座高43cm  
 ●重量：16.1kg  
 ●折りたたみ幅：32cm  
 ●シート奥行：38cm  
 ※38/34cmに設定可能  
 ●最大使用者体重：100kg  
 ●クッション厚：5cm

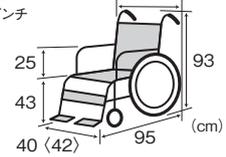

ノーバンク  
タイヤ  
足踏み  
ブレーキ




●オプション…延長棒(+10cm)

**多機能タイプ** 介助式  
**グレイスコア アジャスト (介助)**  
**GRC-61BD** 松永製作所

屋内	A B C D E	アームサポート	高さ調整
屋内	A B C D E	アームサポート	跳ね上げ
屋外	A B C D E	フットレグサポート	着脱
屋外	A B C D E	フットレグサポート	スイングアウト
座幅	商品コード	バックサポート	張り調整
40cm幅	728863	座シート	奥行調整
42cm幅	728864		

※〈〉は42cm幅  
 TAISコード 00066-000410  
 ●前輪：5インチ ●後輪：16インチ  
 ●サイズ：全幅56・58cm  
 座幅40・42cm  
 前座高41・43・45cm  
 ●重量：17.1kg  
 ●折りたたみ幅：32cm  
 ●シート奥行：38cm  
 ※38/34cmに設定可能  
 ●最大使用者体重：100kg  
 ●クッション厚：5cm

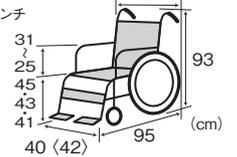

ノーバンク  
タイヤ  
足踏み  
ブレーキ



●オプション…延長棒(+10cm)

**多機能タイプ/低床タイプ** 介助式  
**グレイスコア ミニモ (介助)**  
**GRC-60BD** 松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	728871	00066-000421
42cm幅	728872	

●前輪：5インチ ●後輪：16インチ  
 ●サイズ：全幅56・58・座幅40・42・前座高37・(※39)cm  
 ●重量：16.9kg ●折りたたみ幅：32cm  
 ●シート奥行：32・36cm ●最大使用者体重：100kg  
 ※前座高39cmはメーカーオプションとなります。

「自分の意思で移動したい」  
 そんな想いに寄り添いたい  
 あなただけの椅子づくり



ノーバンク  
タイヤ  
足踏み  
ブレーキ



●オプション…延長棒(+10cm)

**モジュールタイプ** 介助式  
**ULTRA モジュール (介助) NAH-U7 エアリー仕様** 日進医療器

座幅	カラー	商品コード
40~	インディゴ	728620
44cm幅	ワイン	728625

●前輪：6インチ ●後輪：14インチ  
 ●サイズ：全幅54・56・58・座幅40・42・44cm  
 前座高40・42・44cm  
 ●重量：13.7kg  
 ●折りたたみ幅：26cm  
 ●シート奥行：38cm  
 ●最大使用者体重：100kg

エアリー  
3Dシート  
クッション  
標準装備  
スイング  
イン・アウト  
カバー付  
キャスター  
楽々介助  
ブレーキ



選べる  
シート色!  
ノーバンク  
タイヤ




●オプション…ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラパッド、ベルト、ガードル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

**リクライニング/ティルト** リクライニング・ティルト式  
**マイチルト・コンパクトII MH-CR2L-SE** 松永製作所

商品コード	TAISコード
730316	00066-000414

●前輪：5インチ ●後輪：12インチ  
 ●サイズ：全幅53.5・座幅40・前座高43cm  
 ●重量：29.3kg ●折りたたみ幅：40cm  
 ●シート奥行：38cm  
 ●最大使用者体重：100kg

「リラックスと  
 自立支援」  
 2つの共存

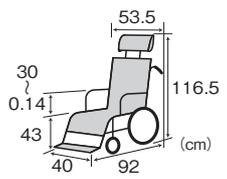

ティルト角度 0~30°  
 リクライニング 90~125°

バックサポート張り調整  
 3D立体スリキング

足踏み  
ブレーキ  
ノーバンク  
タイヤ


●オプション…ワンタッチプラスチックベルト

**リクライニング/ティルト** リクライニング・ティルト式  
**カルティマ ティルト&リクライニング CRT-WR ミキ**

商品コード	TAISコード
730255	00122-000620

●前輪：6インチ ●後輪：14インチ  
 ●サイズ：全幅55・座幅40・前座高43.5cm  
 ●重量：16.8kg ●折りたたみ幅：31cm  
 ●シート奥行：40cm  
 ●最大使用者体重：100kg

女性や  
 カの弱い方でも  
 扱いやすい  
 超軽量・コンパクト

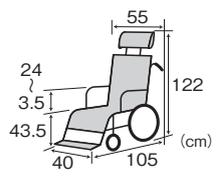

ティルト角度 0~30°  
 リクライニング 95~130°

足踏み  
ブレーキ  
ノーバンク  
タイヤ

●オプション…エレベーターユニット

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※ティルト&リクライニングは対床面角度です。ティルト：傾斜角度/リクライニング：背角度

- 特殊寝台
- 特殊着付付用品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 徘徊感知機器
- 手すり
- 歩行補助つえ
- 歩行器
- 車いす
- 車いす付属品
- スロープ
- 移動用リフト
- 鳥糞掃除装置
- 購入品一入浴
- 購入品二排泄

# ティルト／リクライニング式

サービスコード(車いす) 介護給付:171001 / 予防給付:671001  
 サービスコード(車いす付属品) 介護給付:171002 / 予防給付:671002

車いす

## リクライニング

### NEO-4α

日進医療器

商品コード	TAISコード
730320	00175-000413

- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅58・座幅40・前座高47cm
- 肘高:24cm
- 重量:19.2kg
- 折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:40cm
- 最大使用者体重:100kg



非課税

●オプション…ボンベ架(専用)、ブラバックルベルト、延長棒

ハンドル高さ

95cm


リクライニング

95~169°

ノーバンク  
タイヤ

## リクライニング式

屋内	A B C D E
屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整
アームサポート	着脱
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

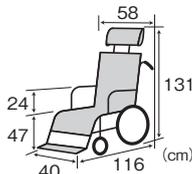

## 専用オプション

### ボンベ架(専用)

型式	商品コード	TAISコード
KF-26R	765706	00175-000419

- サイズ:ボンベ架内径10.5cm
- 重量:2.1kg



## ティルト

### 座王X ティルト(自走/介助)

日進医療器

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
自走式	NA-XF7	730275	00175-000391
介助式	NAH-XF5	730280	00175-000390

- 前輪:6インチ ●後輪:自走式/22インチ、介助式/14インチ
- サイズ:自走式/全幅59・座幅40・前座高42・44・46cm  
介助式/全幅60・座幅40・前座高42・44・46cm
- 重量:自走式/19.6kg、介助式/18.9kg
- 折りたたみ幅:自走式/34cm、介助式/35cm
- シート奥行:38cm ●最大使用者体重:100kg



●オプション…エレベータリングユニット、ブラバックルベルト、延長棒

<自走式>



非課税

<介助式>



非課税

ティルト角度

<自走式>

-4~18°

<介助式>

-4~30°

エアリー

3D  
シート

クッション  
標準装備

スイング  
イン・アウト

カバー付  
キャスター

アンカー  
フレーム

色々介助  
ブレーキ

AUTO  
FIT

ノーバンク  
タイヤ

ティルト式

屋内 A B C D E

屋外 A B C D E

アームサポート 高さ調整

アームサポート 跳ね上げ

フットレグサポート 着脱

フットレグサポート スイングアウト

バックサポート 張り調整

座シート 奥行調整

<>は介助式

※(前)×(奥)

29 30 (60)

27 28 131

25 26 102

23 24

※ 46 44 42

40 105

## モジュール／リクライニング／ティルト

### REDWOOD-Ⅲ SP エレベータリング仕様

日進医療器

型式	商品コード	TAISコード
REDWOOD3SP	730225	00175-000374

- 前輪:6インチ ●後輪:14インチ
- サイズ:全幅60・座幅42cm  
前座高42cm
- 肘高:2・18~30cm
- 重量:28kg
- 折りたたみ幅:34cm
- シート奥行:38・40・42cm
- 最大使用者体重:100kg



ノーバンク  
タイヤ

非課税

●オプション…ブラバックルベルト、ボンベ架(専用)、ガードル掛け(専用)、ブレーキ延長棒

ハンドル高さ

97cm

ティルト角度

-3~40°

リクライニング

90~170°

エアリー

3D  
シート

クッション  
標準装備


カバー付  
キャスター

色々介助  
ブレーキ

足踏み  
ブレーキ

## リクライニング・ティルト式

屋内	A B C D E
屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整
アームサポート	落とし込み
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

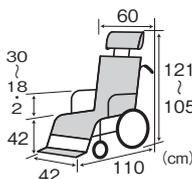

## 専用オプション

### ボンベ架RW(専用)

型式	商品コード	TAISコード
KF-20RW	766165	00175-000376

- サイズ:内径13.3×高さ21cm
- 重量:1.5kg



### ガードル掛けRW(専用)

型式	商品コード	TAISコード
KF-9RW	766170	00175-000375

- 長さ:88~158cm



## リクライニング／ティルト

### フルリクライニング車いす RJ-370B

いすら

商品コード	TAISコード
730290	00084-000134

- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅61.5・座幅41・前座高53cm
- 肘高:前部/4.5~19.9cm  
後部/0.5~24.9cm  
(7段階調節)
- 重量:40kg ●シート奥行:42.5cm
- 最大使用者体重:100kg



ノーバンク  
タイヤ

非課税

●オプション…ボンベ架(専用)、ガードル架(専用)

ハンドル高さ

(下側) 91cm

(上側) 117cm

ティルト角度

0~20°

リクライニング


105~165°

足踏み  
ブレーキ

ゲルクッションの採用  
ゲルクッションを採用し、臀部を支える座面の体圧分散効果を高めています。

## リクライニング・ティルト式

屋内	A B C D E
屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

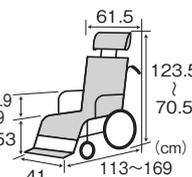

## 専用オプション

### ボンベ架

型式	商品コード	TAISコード
RJ37-291-000	765685	00084-000136

- サイズ:内径10.3×35cm
- 重量:1.8kg(取付金具付)  
1.5kg(ボンベ架のみ)



### ガードル架

型式	商品コード	TAISコード
RJ37-191-000	765680	00084-000135

- 長さ:124cm



車載ワンタッチ固定

車載用

Nツアラ

日進医療器


自動車(車いす移動車)での移動時の利便性と安全性に優れた車いす



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
自走式	NA-NT2W	727883	00175-000428
介助式	NAH-NT2W	728883	00175-000429

- 前輪：6インチ ●後輪：自走式/22インチ、介助式/16インチ
- サイズ：自走式/全幅56・座幅40・前座高43cm  
介助式/全幅54・座幅40・前座高43cm
- 重量：自走式/15.2kg、介助式/14.4kg
- 折りたたみ幅：自走式/30cm、介助式/27cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

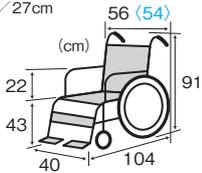

ノーバンク  
タイヤ

在庫  
お問い合わせ  
商品

〈自走式〉

〈介助式〉



非課税

非課税

- オプション…着脱式ヘッドサポート(専用)、ワンストップブレーキ、ブラバクセルベルト、ブレーキ延長棒(+16cm)

ご購入時には在庫をお問い合わせください。

TOURER Nツアラ

車いすの自動車(車いす移動車)での移動がもっと簡単・便利に安心感につながる、快適な移動



- オプション  
着脱式ヘッドサポート
- ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ  
標準装備
- 車椅子簡易固定システム  
対応アンカーバー

〈自走式〉  
NA-NT2W  
オプション使用

〈自走式〉  
NA-NT2W  
標準使用



折りたたみ時

車椅子簡易固定標準化コンソーシアムが進める  
車いすの自動車等へのワンタッチ固定方式



車いす移動車の固定装置が車いすのアンカーバーを自動的にホールド。複雑な固定手順が不要です。

- 簡単
- 便利
- 高い安全性



ワンタッチ固定式ではない、従来のワイヤーフック固定式の車いす移動車にも乗降できます。  
※フレームにはフック固定位置を示すマークがついています。

専用オプション

着脱式ヘッドサポート

型式	商品コード	TAISコード
KF-52	766265	00175-000432

●ヘッドサポート高：63～84cm ●重量：1.1kg



電動アシスト

電動

ミライト・ウイング グリッププッシュ式

ミキ


介助者の歩行速度に合わせた快適な走行が可能な「グリッププッシュ式」のE!サポート車いす 快適装備を充実させたハイグレードモデル

型式	商品コード	TAISコード
CRT-ES-4	810***	00122-000685

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅50・座幅40・前座高47cm ※クッション込サイズです。
- 重量：17.7kg(バッテリー含む)
- 折りたたみ幅：31cm ●耐荷重：100kg
- 電源：リチウムイオンバッテリー 24V 5Ah
- 充電時間：約6h ●実用登坂角度：10°(最大登坂角度14°)
- 最高速度：5km/h
- 連続走行距離：11.5km(時速4km/hで3時間)



グリッププッシュ  
グリップ部分を握り、介助者の前進後進に合わせてグリップが前後に押し引きすることで車いすを操作します。

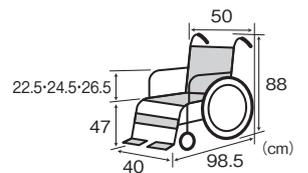

「E!サポート」とは

介助者の車いす操作の負担を軽減するため、電動モーターが補助(アシスト)する仕組みです。

電動アシスト

電動

軽e NAH-U2Wタイプ 転倒防止装置付

日進医療器

電源を入れて、車いすを押すだけで自然に、静かに、安全にサポート



座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	インディゴ	810***	00175-000415

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅54・座幅40・前座高42cm
- 重量：本体/22kg、バッテリー/1.45kg
- 折りたたみ幅：41cm ●耐荷重：100kg
- 制御方法：マイコン制御、電動モーター駆動
- 電源：リチウムイオンバッテリー 25.2V 8.4Ah
- 充電時間：約4h(2hの充電で約70%充電)
- 実用登坂角度：最大14°
- アシスト最高速度：6km/h未満(登坂角度14°未満時)
- 連続走行距離：18km(時速4km/hで4.5時間)

ノーバンク  
タイヤ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

インディゴ

- オプション…杖入れ(専用)、延長棒



ボタンは電源「入/切」のひとつだけとっても簡単に使えます。



グリップの押し・引きの力を感知して車いすの操作を適切にアシスト

3Dバックサポート採用のウルトラシリーズだから快適姿勢で乗車できます。

リチウムイオンバッテリーで長時間・長距離アシスト走行

静音モーター内蔵アシストタイヤ

ノーバンクタイヤ エアリー装備

- エアリー
- 3Dシート
- クッション厚み調整
- スイングインアウト
- カバー付キャスター
- アンカーフレーム
- 糸々介助ブレーキ

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞掃除装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

電動

JWアクティブ PLUS+



商品コード TAISコード  
810599 00233-000104

- 前輪:7インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅63・座幅39・前座高44cm
- 重量:28.7kg (バッテリー含まず)
- 折りたたみ幅:35cm ●耐荷重:100kg
- 速度範囲:1.7~4.5km/h ●走行距離:15km
- 充電時間:2.5~3h ●実用登坂:角度6°



非課税

電動

タウニジョイX PLUS+



商品コード TAISコード  
810601 00233-000100

- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅59.5・座幅41・前座高43cm
- 重量:26.5kg (バッテリー含まず)
- 折りたたみ幅:34.2cm ●耐荷重:75kg
- 速度範囲:1.6~4.6km/h ●走行距離:16km
- 充電時間:2.5~3h ●実用登坂:角度6°



非課税

電動カート

WHILL Model CK2 (ウィル モデル シーケーター) ウィル

商品コード TAISコード  
810\*\*\* 01520-000028

- サイズ:幅55.4×奥行98.5×高さ74.5~94.5cm
- 重量:約52kg ●最高速度:6km/h
- 走行距離:約18km ●充電時間:5h
- 実用登坂:角度10° ●段差乗り越え:5cm
- 最小回転半径:76cm
- バッテリー:リチウムイオン (25.3V 10.6Ah)
- 使用環境:-15°C~40°C



もっと自由に  
移動すれば、  
もっと毎日は  
豊かになる

WHILL Model CKもご用意しております。

非課税

電動カート

遊歩フジ(四輪)

セリオ

商品コード TAISコード  
810\*\*\* 00020-000048

- 重量:101kg ●耐荷重:100kg
- 速度範囲:前進0.5~6km/h、後進0.5~2km/h
- 走行距離:28km ●充電時間:1~13h
- 実用登坂:角度10° ●段差乗り越え:8cm



非課税

ホワイトマイカ

電動カート

遊歩スマイルα(四輪)

セリオ

商品コード TAISコード  
810\*\*\* 00020-000053

- 重量:98kg ●耐荷重:100kg
- 速度範囲:前進0.5~6km/h、後進0.5~2km/h
- 走行距離:30km ●充電時間:1~13h
- 実用登坂:角度10° ●段差乗り越え:8cm

多機能の電動カート  
大容量のフロントバスケットは  
お買い物にも最適です



非課税

ナチュラルベージュ

電動カート

遊歩スキップα(四輪)

セリオ

商品コード TAISコード  
810\*\*\* 00020-000054

- 重量:90kg ●耐荷重:75kg
- 速度範囲:前進0.5~6km/h、後進0.5~2km/h
- 走行距離:24km ●充電時間:1~11h
- 実用登坂:角度10° ●段差乗り越え:8cm

スマート&コンパクトな電動カート  
誤作動防止フレームで  
安全・快適に



非課税

ライトパープル

電動カート

セニアカー (四輪) NEW

スズキ

商品コード TAISコード  
810\*\*\* 00152-000033

- 重量:100kg ●耐荷重:100kg
- 速度範囲:前進1~6km/h、後進1~2km/h
- 走行距離:31km ●充電時間:0~12h
- 実用登坂:角度10° ●段差乗り越え:7.5cm

センサーが前方障害物を検知すると  
運転者に警告、さらに障害物との距離  
が短くなった場合は自動で減速します



非課税

電動カート

セニアカー (四輪)

スズキ

商品コード TAISコード  
732\*\*\* 00152-000013

- 重量:98kg ●耐荷重:100kg
- 速度範囲:2~6km/h ●走行距離:33km
- 充電時間:0~12h ●実用登坂:角度10°
- 段差乗り越え:高さ7.5cm ●溝乗り越え:幅10cm

カンタン便利  
楽しい毎日



非課税

電動車いすに関する法令について

電動車いすが歩行車と扱われるためには、道路交通法施工規則上の車体の大きさ、速度基準を満たす必要があります。

- 全長120cm、全幅70cm、全高120cmの基準内である必要があります。
- 本カタログに掲載している電動車いす本体はすべて基準値以内ですが、杖立て等の付属品を取り付けることにより基準値を超える場合があります。
- 基準値を超える場合でも、利用者または利用者から依頼を受けた人が利用者の住所地を管轄する警察署長に確認申請をして、身体的状況等によりやむを得ないと判断されて確認証の交付を受けた場合には、歩行車の扱いとなります。なお利用者は確認証を携帯する必要があります。
- 時速6km以内である必要があります。

\*商品コードは地域によって異なります。

\*介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

Gra-Fit オプション

ボンベ架 KZ-229801

パラマウントベッド

商品コード TAISコード  
765660 00170-001369

- 対応ボンベ:直径130mm以下
- ボンベ収納部高さ:22cm

PCS  
オリジナル

多機能  
モデル  
軽量  
モデル  
自走式のみ



※Gra-Fitのボンベ架は、左右どちらにも装着可能です。

注意

後方転倒の危険性があるため、3kg以内のボンベのご使用に限ります。

回転式転倒防止装置 KZ-229802

パラマウントベッド

商品コード TAISコード  
765665 00170-001370

- 左右2本1組

PCS  
オリジナル

多機能  
モデル  
軽量  
モデル  
自走式のみ

回転させて内側に収納が可能です



IVポールセット KZ-229805

パラマウントベッド

商品コード TAISコード  
765670 00170-001373

- ガートル棒長さ:88~158cm(ノブボルトによる伸縮式)

PCS  
オリジナル

多機能  
モデル  
軽量  
モデル



IVポールセットTR用 KZ-229812

パラマウントベッド

商品コード TAISコード  
766250 00170-001572

- ガートル棒長さ:81~151cm(ノブボルトによる伸縮式)

PCS  
オリジナル

ティルト&リクライニング  
モデル



エレベータリングユニット

パラマウントベッド

KZ-229807

商品コード TAISコード  
765675 00170-001375



拳上式・開き式・着脱式のフット・レッグサポートです。

PCS  
オリジナル

多機能  
モデル

KZ-229811

商品コード TAISコード  
766245 00170-001571

フットプレート  
角度可変!



拳上式・開き式・着脱式のフット・レッグサポートです。

PCS  
オリジナル

ティルト&  
リクライニング  
モデル  
多機能  
モデル

ワンストップブレーキ

商品コード TAISコード  
765655 00175-000352

片側のレバー操作で左右同時にブレーキをかけることのできる駐車ブレーキです。操作側(左右)の切り替えは、ネジこみ式のレバーを手で付け替えるだけでできます。



ブラバックルベルト KF-6C

商品コード TAISコード  
726905 00175-000296

ベルトはPPベルトとなります。



ティルト&  
リクライニング  
モデル

多機能  
モデル  
軽量  
モデル

ブレーキレバー延長棒(+8cm)

商品コード TAISコード  
765600 00175-000285

駐車ブレーキの操作レバーを8cm長くします。装着方法はネジこみ式です。※軽量スタンダードモデルの介助用には装着できません。



多機能  
モデル  
軽量  
モデル

杖入れ KF-7BM

商品コード TAISコード  
726910 00175-000286

- 杖収納ケース:5×10cm



多機能  
モデル  
軽量  
モデル

Gra-Fit オプション適合表

※1 ボンベ架との併用不可

頁	商品名	型式	オプション								
			Gra-Fit 専用オプション					共通オプション			
			ボンベ架	回転式転倒防止装置	IVポールセット	IVポールセットTR用	エレベータリングユニット	ワンストップブレーキ	ブラバックルベルト	延長棒(+8cm)	杖入れ
68	グラフィット自走 多機能40幅	KZ-211830	○	○	○	—	○	○	○	○	○
	グラフィット自走 多機能45幅	KZ-211840	○	○	○	—	○	○	○	○	○
	グラフィット介助 多機能40幅	KZ-212830	○	○	○	—	○	○※1	○	○	○
	グラフィット介助 多機能45幅	KZ-212840	○	○	○	—	○	○※1	○	○	○
	グラフィット自走 多機能低床40幅	KZ-211860	○	○	○	—	○	○	○	○	○
	グラフィット自走 多機能低床45幅	KZ-211870	○	○	○	—	○	○	○	○	○
	グラフィット自走 軽量40幅	KZ-211800	○	○	○	—	—	○	○	○	○
	グラフィット自走 軽量45幅	KZ-211810	○	○	○	—	—	○	○	○	○
69	グラフィット介助 軽量40幅	KZ-212800	—	—	○	—	—	—	○	—	○
	グラフィット介助 軽量45幅	KZ-212810	—	—	○	—	—	—	○	—	○
	グラフィット(自動ブレーキ付)自走 多機能低床40幅	KZ-211865	○	○	○	—	○	—	○	○	○
	グラフィット(自動ブレーキ付)自走 多機能低床45幅	KZ-211875	○	○	○	—	○	—	○	○	○
	グラフィットティルト 多機能コンパクト40幅	KZ-212880	—	○	—	—	○	—	○	—	○
	グラフィット ティルト & リクライニング40幅	KZ-214830	—	—	—	○	○	—	○	—	—
グラフィット ティルト & リクライニング45幅	KZ-214840	—	—	—	○	○	—	○	—	—	

車いすオプション

マイバディ イージーヘッド

ユーキ・トレーディング

商品名 商品コード TAISコード 対応サイズ  
マイバディ イージーヘッドPR 766185 00468-000050 背パイプ外外360~500mmの車いす  
マイバディ イージーヘッドPS 766180 00468-000049 背パイプ外外265~410mmの車いす

- サイズ: PR / 最大全高51cm×全幅39.5~53.5cm  
PS / 最大全高51cm×全幅29.5~44cm
- 重量: PR / 約1.95kg、PS / 約1.88kg
- 材質: ウレタン・ステンレス・鉄・アルミ・合成樹脂

※背パイプ: 外外寸法によりサイズが異なります。  
※車いすの機種やサイズにより干渉する箇所が発生する場合がございます。  
※事前にデモ機などでのシミュレーションをお勧めいたします。(車いすオプション適合表表外としております)



後付け簡単ヘッドサポート  
合わせたい位置に  
自由自在の調整

多様な車いすに  
取付け可能



取付例

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位交換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排煙装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

購入品(入浴)

購入品(排泄)

購入品(入浴)

購入品(排泄)

車いすオプション

※次頁「車いすオプション適合表」をご覧ください。

ワンストップブレーキ 日進医療器

商品コード	TAISコード	●重量:
765655	00175-000352	車いす本体+0.6kg ●付属品:延長棒8cm1本 本体ブレーキレバー2本



エレベーターユニット(座王用) 日進医療器

型式	商品コード	TAISコード
KF-EC	766215	00175-000396



エレベーターユニット(ULTRAシリーズ用) 日進医療器

型式	商品コード	TAISコード
KF-EB	726880	00175-000347



エレベーターユニット ミキ

商品コード	TAISコード
727715	00122-000436



プラバックルベルト KF-6C 日進医療器

商品コード	TAISコード	●サイズ:
726905	00175-000296	幅5×最大長110cm



ワンタッチプラスチックベルト 松永製作所

商品コード	TAISコード
766005	00066-000201



ガードル掛け KF-8B 日進医療器

商品コード	TAISコード
726895	00175-000287

●長さ:81~151cm



ガードル掛け カワムラサイクル

タイプ	商品コード	TAISコード
前止め	765700	00160-000167
後止め	765705	



後方ガードル架セット 松永製作所

商品コード	TAISコード
766175	00066-000209



※ガードル棒付き  
※地域によっては対応が  
できない場合もございます。

ボンベ架 日進医療器

型式	商品コード	TAISコード
KF-20S	726890	00175-000288

●サイズ:内径10.5×高さ29cm ●重量:1.3kg

**注意**

後方転倒の危険性がある  
ため、3kg以内のボンベ  
のご使用に限ります。



ウイング用ボンベ架 ミキ

商品コード	TAISコード
766275	00122-000594

●サイズ:内径13cm  
●重量:1.44kg



ボンベ架 (BAL-R2用) ミキ

商品コード	TAISコード
766045	00122-000214

●サイズ:直径最大16cmまで対応可  
●重量:0.9kg



ボンベ架 (NEXT用) 松永製作所

商品コード	TAISコード
766220	00066-000345



ボンベ架 カワムラサイクル

商品コード	TAISコード
765690	00160-000166



専用転倒防止バー付ボンベ架(右取付のみ) ミキ

商品コード	TAISコード
766280	00122-000591

●サイズ:内径13cm  
●重量:1.34kg



キャストラック取付用  
点滴棒ホルダー(前方用) ミキ

商品コード	TAISコード
766125	00122-Z00044

●サイズ:  
点滴棒径  
φ16~22mm対応  
●重量:0.22kg



後方用点滴棒用ホルダー ミキ

商品コード	TAISコード
766270	00122-000592


●サイズ:  
点滴棒径  
φ16~22mm対応  
●重量:0.24kg



杖入れ KF-7BM 日進医療器

商品コード	TAISコード
726910	00175-000286

●受けサイズ:  
幅5×奥行10×高さ5cm  
●重量:0.1kg

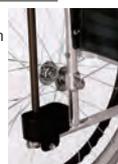

杖入れ(大)(NEXT用) 松永製作所

商品コード	TAISコード
766225	00066-000344



# 車いすオプション

# 車いす付属品

<b>延長棒 (+20cm)</b> カワムラサイクル 商品コード: 766105   TAISコード: 00160-000261 	<b>ブレーキ延長棒 (+16cm)</b> 日進医療器 商品コード: 765605   TAISコード: 00175-000285 	<b>延長棒 (+15cm)</b> 松永製作所 商品コード: 765510   TAISコード: 00066-000298 
<b>延長棒 (+10cm)</b> 松永製作所 商品コード: 765505   TAISコード: 00066-000298 	<b>延長棒 (+10cm) (+5cm)</b> ミキ 商品コード (+10cm): 765645   商品コード (+5cm): 765640   TAISコード: 00122-000426 	<b>延長棒 (+10cm)</b> カワムラサイクル 商品コード: 766100   TAISコード: 00160-000170 

## 車いすオプション適合表

頁	型式	オプション									
		ワンストップ ブレーキ	エレベータ ユニット	ブラバックル ベルト	ワンタッチ プラスチックベルト	ガートル掛け	後方 ガートル架セット	ボンベ架	点滴ホルダー	杖入れ	延長棒
70	BAL-R3	-	○	-	-	-	-	○ (ウイング用)	○	-	○ (ミキ)
	BAL-R1	-	-	-	-	-	-	○ (転倒防止用)	○	-	○ (ミキ)
	NEO-1βW	○	○ (KF-EC)	○	-	○ (後)	-	-	-	-	○ (日進医療器)
	NEO-1β	○	-	○	-	○ (後)	-	-	-	-	○ (日進医療器)
	SY22-40SB	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○ (カワムラサイクル)
72	GRC-11B	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○ (松永製作所)
	GRC-31B	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○ (松永製作所)
	GRC-51B	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○ (松永製作所)
	GRC-50B	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○ (松永製作所)
	NA-U6	-	○ (KF-EB)	○	-	-	-	-	-	-	○ (日進医療器)
73	NA-U7	○	○ (KF-EB)	○	-	○ (後)	-	○ (KF-20S)	-	○ (KF-7BM)	○ (日進医療器)
	BAL-R4	-	○	-	-	-	-	○ (ウイング用)	○	-	○ (ミキ)
	BAL-R2	-	-	-	-	-	-	○ 専用	○	-	○ (ミキ)
	NEO-2βW	○	○ (KF-EC)	○	-	○ (後)	-	-	-	-	○ (日進医療器)
	NEO-2β	○	-	○	-	○ (後)	-	-	-	-	○ (日進医療器)
75	SY16-40SB	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○ (カワムラサイクル)
	GRC-21BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ (松永製作所)
	GRC-41BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ (松永製作所)
	GRC-61BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ (松永製作所)
	GRC-60BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ (松永製作所)
76	NAH-U7	○	○ (KF-EB)	○	-	○ (後)	-	-	-	○ (KF-7BM)	○ (日進医療器)
	MH-CR2L-SE	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	CRT-WR	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	NEO-4α	-	○ 標準	○	-	-	-	○ 専用	-	-	○ (日進医療器)
	NA-XF7	-	○ (KF-EC)	○	-	-	-	-	-	-	○ (日進医療器)
77	NAH-XF5	-	○ (KF-EC)	○	-	-	-	-	-	-	○ (日進医療器)
	REDWOOD-III SP	-	○ 標準	○	-	○ 専用 (前)	-	○ 専用	-	-	○ (日進医療器)
	RJ-370B	-	-	-	-	○ 専用	-	○ 専用	-	-	-
	NA-NT2W	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○ (日進医療器)
	NAH-NT2W 軽e	○	-	○	-	-	-	-	-	○ 専用	○ (日進医療器)
84	Gal-51	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○ (松永製作所)
	Gal-11	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○ (松永製作所)
	Gal-50	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○ (松永製作所)
	Gal-52	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○ (松永製作所)
	NA-U2W	○	△ ※1 (KF-EB)	○	-	○ (後)	-	○ (KF-20S)	-	○ (KF-7BM)	○ (日進医療器)
85	NA-U1	○	-	○	-	○ (後)	-	○ (KF-20S)	-	○ (KF-7BM)	○ (日進医療器)
	NA-X521W	-	○ (KF-EC)	○	-	○ (後)	-	○ (KF-20S)	-	○ (KF-7BM)	○ (日進医療器)
	NA-U2W・BG	-	○ (KF-EB)	○	-	○ (後)	-	○ (KF-20S)	-	○ (KF-7BM)	○ (日進医療器)
	NEO-1αW	○	○ (KF-EC)	○	-	○ (後)	-	-	-	-	○ (日進医療器)
	NEO-1α	○	-	○	-	○ (後)	-	-	-	-	○ (日進医療器)
86	NAH-U2W	○	△ ※1 (KF-EB)	○	-	○ (後)	-	-	-	○ (KF-7BM)	○ (日進医療器)
	NAH-U1	○	-	○	-	○ (後)	-	-	-	○ (KF-7BM)	○ (日進医療器)
	Gal-61	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○ (松永製作所)
	Gal-21	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○ (松永製作所)
	Gal-60	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○ (松永製作所)
87	NEO-2αW	○	○ (KF-EC)	○	-	○ (後)	-	-	-	-	○ (日進医療器)
	NEO-2α	○	-	○	-	○ (後)	-	-	-	-	○ (日進医療器)
	MH-SRL-SE	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	MH-GRL-SE	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	NAH-UC・Hi	-	○ (KF-EB)	○	-	○ 専用 (前)	-	-	-	-	-
NAH-UC・Lo	-	○ (KF-EB)	○	-	○ 専用 (前)	-	-	-	-	-	

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※1…座幅38cmのみ車いす本体のフットサポートに交換必要。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥籠排煙装置

購入品 (入浴)

購入品 (排泄)

購入品 (入浴)

購入品 (排泄)

頁	型式	タイプ	各部サイズ							
			重量	座幅	シート奥行	前座高	肘高	全幅	全高	全長
			kg	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
68	KZ-211830(自走)(40)	多機能	15.9	40	38	42/44/46	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	58	91/93/95	101
	KZ-211840(自走)(45)	多機能	16	45	40	42/44/46	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	63	91/93/95	101
	KZ-212830(介助)(40)	多機能	14.4	40	38	42/44/46	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	56	91/93/95	101
	KZ-212840(介助)(45)	多機能	14.7	45	40	42/44/46	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	62	91/93/95	101
	KZ-211860(自走)(40)	多機能/低床	15.4	40	38	36/38/40	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	58	86/88/90	101
	KZ-211870(自走)(45)	多機能/低床	15.4	45	40	36/38/40	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	63	86/88/90	101
	KZ-211800(自走)(40)	軽量	13.6	40	38	42	前24/奥25	58	93	98
	KZ-211810(自走)(45)	軽量	13.8	45	40	42	前24/奥25	63	93	98
	KZ-212800(介助)(40)	軽量	11.9	40	38	42	前25/奥26	59	93	100
69	KZ-212810(介助)(45)	軽量	12	45	40	42	前25/奥26	64	93	100
	KZ-211865(自走)(40)	多機能/低床	18.2	40	38	36/38/40	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	58	86/88/90	101
	KZ-211875(自走)(45)	多機能/低床	18.2	45	40	36/38/40	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	63	86/88/90	101
	KZ-212880(40)	コンパクト/多機能	14	40	38	42/44/46	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	48	91/93/95	101
70	KZ-214830(40)	リクライニング/ティルト	21	40	40	45	3・18-32	54	115	111
	KZ-214840(45)	リクライニング/ティルト	21.5	45	42	45	3・18-32	59	115	113
	BAL-R3	多機能	13.9	40	40	43.5	24	60	91	97.5
	BAL-R1	標準	12.3	40	40	43.5	24	60	91	94.5
	NEO-1βW	多機能	13.4	40	40	43	22	58	90	100
	NEO-1β	標準	12.3	40	40	43	22	63	91	99
	CRT-SG-7(40)	多機能	12.2	40	38	43.5	24.5	55	88	96
71	CRT-SG-7(42)	多機能	12.2	42	38	43.5	24.5	57	88	96
	CRT-SG-5(40)	標準	11.1	40	38	43.5	24.5	55	88	96
	CRT-SG-5(42)	標準	11.1	42	38	43.5	24.5	57	88	96
	CRT-SG-3	多機能	11.7	40	38	43.5	24.5	55	88	96
	CRT-SG-1	標準	10.6	40	38	43.5	24.5	55	88	96
	AFP-22	多機能	19.7	40	38/44	46/48/50	22/24/26	61	92/94/96	109
	AFS-22	多機能	17.2	40	42	48	17	60	95	105
72	GRC-11B	標準	14.7	40/42	34/38	43	25	56.5/58.5	93	95
	GRC-31B	多機能	16.5	40/42	34/38	43	25	56.5/58.5	93	95
	GRC-51B	多機能	17.1	40/42	34/38	41/43/45	25-31	56.5/58.5	93	95
	GRC-50B	多機能/低床	16.8	40/42	32/36	35/37/(39)	23.5-29.5	56.5/58.5	88/90/92	96
	NA-U6	6輪車	14.7	40	38	38/40/42	前22/奥24	58	79/81/83	91
	NA-U7	モジュール	15.2	40/42/44	38	40/42/44	24/26/28	57/59/61	92/94/96	100
	NEXT-70B	6輪車	18.5	40	36	36.5/38.5/40.5	22.5-28.5	58	91/93/95	86
73	KJP-5	幅広/モジュール	21	48/50/52	40	48/50/52	26/28/30/32	66/68/70	96/98/100	115.5
	BAL-R4	多機能	12.3	40	40	46	24	54.5	93.5	96.5
	BAL-R2	標準	10.8	40	40	43.5	24	55	91	93
	NEO-2βW	多機能	12.8	40	40	43	22	53	90	100
74	NEO-2β	標準	11.3	40	40	43	22	59	91	99
	CRT-SG-8(40)	多機能	11.7	40	38	43.5	24.5	49	88	96
	CRT-SG-8(42)	多機能	11.7	42	38	43.5	24.5	51	88	96
	CRT-SG-6(40)	標準	10.5	40	38	43.5	24.5	49	88	96
	CRT-SG-6(42)	標準	10.5	42	38	43.5	24.5	51	88	96
	CRT-SG-4	多機能	11.3	40	38	43.5	24.5	49	88	96
	CRT-SG-2	標準	10.1	40	38	43.5	24.5	49	88	96
	AFP-16	多機能	18.4	40	38/44	46/48/50	22/24/26	56.5	92/94/96	109
	AFS-16	多機能	15.7	40	42	48	17	54	95	105
75	GRC-21BD	標準	14.4	40/42	34/38	43	25	56.5/58.5	93	95
	GRC-41BD	多機能	16.1	40/42	34/38	43	25	56.5/58.5	93	95
	GRC-61BD	多機能	17.1	40/42	34/38	41/43/45	25-31	56/58	93	95
	GRC-60BD	多機能/低床	16.9	40/42	32/36	37/(39)	23.5-29.5	56/58	89/91	97.5
	NAH-U7	モジュール	13.7	40/42/44	38	40/42/44	24/26/28	54/56/58	92/94/96	100
	MH-CR2L-SE	リクライニング/ティルト	29.3	40	38	43	0.14-30	53.5	116.5	92
76	CRT-WR	リクライニング/ティルト	16.8	40	40	43.5	3.5-24	55	122	105
	NEO-4α	リクライニング	19.2	40	40	47	24	58	131	116
	NA-XF7	ティルト	19.6	40	38	42/44/46	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	59	102-131	105
	NAH-XF5	ティルト	18.9	40	38	42/44/46	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	60	102-131	105
	REDWOOD-Ⅲ SP	リクライニング/ティルト/モジュール	28	42	38/40/42	42	2・18-30	60	105-121	110
77	RJ-370B	リクライニング/ティルト	40	41	42.5	53	前4.5-19.9 後0.5-24.9	61.5	70.5-123.5	113-169
	NA-NT2W(自走)	車載ワンタッチ固定	15.2	40	40	43	22	56	91	104
	NAH-NT2W(介助)	車載ワンタッチ固定	14.4	40	40	43	22	54	91	104
	CRT-ES-4(介助)	電動アシスト	17.7	40	38	43.5(47)	26/28/30 (22.5/24.5/26.5)	50	88	98.5
78	軽e	電動アシスト	22	40	38	42	前22/奥24	54	92	97
	JWアクティブPLUS+	電動	28.7	39	40	44	27-33	63	87	103.5
	タウニョジョイX PLUS+	電動	26.5	41	39	43	0-25	59.5	88	101.5

折りたたみ幅	キャスター 径	タイヤ(後輪)			機能							
		径	タイヤ幅	タイヤ種類	手元 ブレーキ	介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	アーム サポート	フット・レグ サポート	バック サポート	シート ベルト	クッション
		cm	インチ	cm	種類	可動式	可動式	可動式	可動式	張り調整		
33	6	22	2.5	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
33	6	22	2.5	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
31	6	14	3.8	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
31	6	14	3.8	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
34	5	20	2.5	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
34	5	20	2.5	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
32	6	22	2.5	ノーバンク	○	○	—	—	—	○	—	○
32	6	22	2.5	ノーバンク	○	○	—	—	—	○	—	○
33	6	14	3.8	ノーバンク	○	○	—	—	—	○	—	○
33	6	14	3.8	ノーバンク	○	○	—	—	—	○	—	○
34	5	20	2.5	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
34	5	20	2.5	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
31	6	14	3.8	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
54	6	12	3.5	ノーバンク	—	○	○	○	○	○	—	○
59	6	12	3.5	ノーバンク	—	○	○	○	○	○	—	○
34	6	22	3.7	ノーバンク	○	○	—	○	○	—	—	—
32.5	6	22	3.7	ノーバンク	○	○	—	—	—	—	—	—
32	6	22	3	ノーバンク	○	○	—	○	○	—	—	—
32	6	22	3	ノーバンク	○	○	—	—	—	—	—	—
34	6	22	2.3	ノーバンク	○	○	—	○	○	—	—	—
34	6	22	2.3	ノーバンク	○	○	—	○	○	—	—	—
34	6	22	2.3	ノーバンク	○	○	—	—	—	—	—	—
34	6	22	2.3	ノーバンク	○	○	—	—	—	—	—	—
34	6	22	2.3	ノーバンク	○	○	—	○	○	—	—	—
34	6	22	2.3	ノーバンク	○	○	—	—	—	—	—	—
34	6	22	2.3	ノーバンク	○	○	—	—	—	—	—	—
34	6	22	2.3	ノーバンク	○	○	—	—	—	—	—	—
37	6	22	2.3	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
32.5	6	22	3.2	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
32.5	5	22	2.8	ノーバンク	○	○	—	—	—	○	—	○
32.5	5	22	2.8	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
32	5	22	2.8	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
33	5	20	2.8	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
32	5	20	3	ノーバンク	○	○	—	—	○	○	—	○
30	6	22	2.5	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
34	4	20	2.8	エアタイヤ	○	○	—	—	—	○	—	○
34	8	24	3.2	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
26.5	6	16	4	ノーバンク	○	○	—	○	○	—	—	—
26.5	6	16	4	ノーバンク	○	○	—	—	—	—	—	—
26	6	16	4	ノーバンク	○	○	—	○	○	—	—	—
28	6	16	4	ノーバンク	○	○	—	—	—	—	—	—
27	6	14	3.6	ノーバンク	○	○	—	○	○	—	—	—
27	6	14	3.6	ノーバンク	○	○	—	○	○	—	—	—
27	6	14	3.6	ノーバンク	○	○	—	—	—	—	—	—
27	6	14	3.6	ノーバンク	○	○	—	—	—	—	—	—
27	6	14	3.6	ノーバンク	○	○	—	○	○	—	—	—
27	6	14	3.6	ノーバンク	○	○	—	—	—	—	—	—
31	6	16	4	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
28.5	6	16	4	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
32	5	16	3.1	ノーバンク	○	○	○	—	—	○	—	○
32	5	16	3.1	ノーバンク	○	○	○	○	○	○	—	○
32	5	16	3.1	ノーバンク	○	○	○	○	○	○	—	○
32	5	16	3.1	ノーバンク	○	○	○	○	○	○	—	○
26	6	14	3.8	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
40	5	12	3.1	ノーバンク	—	○	○	○	○	○	—	○
31	6	14	3.6	ノーバンク	○	○	○	○	○	○	—	○
30	6	16	4	ノーバンク	○	○	—	取外しのみ	拳上のみ	—	—	—
34	6	22	2.5	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
35	6	14	3.8	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
34	6	14	3.8	ノーバンク	○	○	○	○	○	○	—	○
—	6	16	4	ノーバンク	—	○	○	○	○	—	—	○
30	6	22	3	ノーバンク	○	○	—	○	○	—	—	—
27	6	16	4	ノーバンク	○	○	—	○	○	—	—	—
31	6	14	3.7	エアタイヤ	○	○	—	○	○	○	—	○
41	6	14	3.8	ノーバンク	○	○	—	○	○	○	—	○
35	7	22	2.8	エアタイヤ	○	—	—	○	○	—	—	○
34.2	6	16	4	エアタイヤ	○	—	—	○	取外しのみ	—	—	○

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排煙装置

購入品(入浴)


購入品(排泄)

多機能タイプ【身長目安 155cm~170cm】 **自走式**

**Galaxyアジャスト(自走) Gal-51** 松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727050	00066-000385

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅56・座幅40・前座高41・43・45cm
- 重量:15.2kg
- 折りたたみ幅:28cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

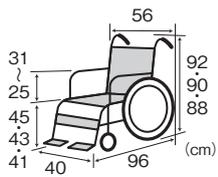

ノーバンク  
タイヤ

バックサポート張り調整  
3D立体スリング




**在庫限定** 非課税

軽量タイプ【身長目安 155cm~170cm】 **自走式**

**Galaxy標準(自走) Gal-11** 松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727045	00066-000383

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅55・座幅40・前座高43cm
- 重量:12.4kg
- 折りたたみ幅:29cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

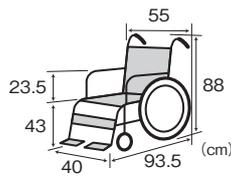

ノーバンク  
タイヤ

バックサポート張り調整  
3D立体スリング




**在庫限定** 非課税

低床多機能タイプ【身長目安 145cm~160cm】 **自走式**

**Galaxyミニモ(自走) Gal-50** 松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727055	00066-000387

- 前輪:5インチ ●後輪:20インチ
- サイズ:全幅56・座幅40・前座高35・37cm
- 重量:14.9kg
- 折りたたみ幅:28cm
- シート奥行:36cm
- 最大使用者体重:100kg

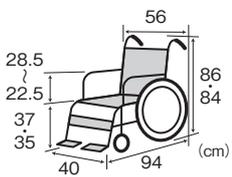

ノーバンク  
タイヤ

バックサポート張り調整  
3D立体スリング




**在庫限定** 非課税

ワイド多機能タイプ【身長目安 165cm~180cm】 **自走式**

**Galaxyワイド(自走) Gal-52** 松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
46cm幅	727060	00066-000389

- 前輪:6インチ ●後輪:24インチ
- サイズ:全幅62・座幅46・前座高45・47cm
- 重量:16.6kg
- 折りたたみ幅:34cm
- シート奥行:40cm
- 最大使用者体重:130kg

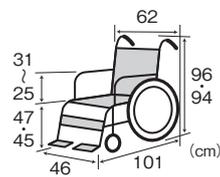

ワイド  
46cm幅

ノーバンク  
タイヤ

バックサポート張り調整  
3D立体スリング



**在庫限定** 非課税

多機能タイプ/幅狭タイプ **自走式**

**ULTRA 多機能(自走) NA-U2W エアリー仕様** 日進医療器

座幅	カラー	商品コード
38cm幅	インディゴ	726830
	ワイン	726845
40cm幅	インディゴ	726835
	ワイン	726850
42cm幅	インディゴ	726840
	ワイン	726855

- エアリー
- 3Dシート
- クッション標準装備
- スイングインアウト
- カバー付キャスター
- アンカーフレーム
- アームサポート
- 高さ調整
- アームサポート
- 跳ね上げ
- フットレグサポート
- 着脱
- フットレグサポート
- スイングアウト
- バックサポート
- 張り調整
- 座シート
- 奥行調整


TAISコード
00175-000358

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅54・56・58cm  
座幅38・40・42cm  
前座高42cm
- 重量:13.8kg
- 折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg



ノーバンク  
タイヤ

選べる  
シート色!

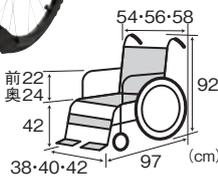

**在庫限定** 非課税

- オプション  
ワンストップブレーキ、エレベーターユニット※1、ブラバックルベルト、ボンベ架、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒
- ※1...座幅38cmのみ車いす本体のフットサポートに交換が必要。

軽量タイプ/幅狭タイプ **自走式**

**ULTRA 標準(自走) NA-U1 エアリー仕様** 日進医療器

座幅	カラー	商品コード
38cm幅	インディゴ	726800
	ワイン	726815
40cm幅	インディゴ	726805
	ワイン	726820
42cm幅	インディゴ	726810
	ワイン	726825

- エアリー
- 3Dシート
- クッション標準装備
- カバー付キャスター
- アンカーフレーム
- アームサポート
- 高さ調整
- アームサポート
- 跳ね上げ
- フットレグサポート
- 着脱
- フットレグサポート
- スイングアウト
- バックサポート
- 張り調整
- 座シート
- 奥行調整


TAISコード
00175-000356

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅54・56・58cm  
座幅38・40・42cm  
前座高42cm
- 重量:12.4kg
- 折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg



ノーバンク  
タイヤ

選べる  
シート色!

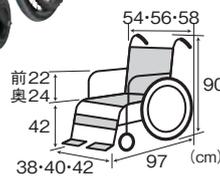

**在庫限定** 非課税

- オプション  
ワンストップブレーキ、ブラバックルベルト、ボンベ架、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

多機能タイプ 自走式

座王X 多機能 (自走) NA-X521W 日進医療器

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727740	00175-000389

●前輪：6インチ ●後輪：22インチ  
●サイズ：全幅57・座幅40cm  
前座高38・40・42cm  
●重量：14.2kg  
●折りたたみ幅：32cm  
●シート奥行：38cm  
●最大使用者体重：100kg

エアリー 3Dシート クッション標準装備  
スイングインシアウト カバー付キャスター アンカーフレーム  
袋々介前ブレーキ AUTO FIT

●オプション  
エレベータリングユニット、ブラバックルベルト、  
ガートル掛け、杖入れ、ボンベ架、延長棒

非課税 **在庫限定**

幅広タイプ/多機能タイプ 自走式

ULTRA 多機能ワイド (自走) NA-U2W・BG エアリー仕様 日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
45cm幅	グリーン	727030	00175-000383

●前輪：6インチ ●後輪：22インチ  
●サイズ：全幅63・座幅45cm  
前座高42・44・46cm  
●重量：14.8kg  
●折りたたみ幅：34cm  
●シート奥行：40cm  
●最大使用者体重：120kg

エアリー 3Dシート クッション標準装備 スイングインシアウト  
カバー付キャスター アンカーフレーム  
袋々介前ブレーキ

●オプション  
エレベータリングユニット、ブラバックルベルト、  
ボンベ架、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

シート：専用シート (取替えはできません)

非課税 **在庫限定**

多機能タイプ/幅狭タイプ 自走式

カルティマ 多機能 (自走) CRT-7 ミキ

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	グリーン	726920	00122-000572
	ピンク	726930	
42cm幅	ネイビー	727040	

●前輪：6インチ ●後輪：22インチ  
●サイズ：40cm幅/全幅55・座幅40・前座高43.5cm  
42cm幅/全幅57・座幅42・前座高43.5cm  
●重量：11.2kg  
●折りたたみ幅：32cm  
●シート奥行：38cm  
●最大使用者体重：100kg

●オプション  
エレベータリングユニット、ブラバックルベルト、  
ガートル掛け、杖入れ、ボンベ架、延長棒

非課税 **在庫限定**

軽量タイプ/幅狭タイプ 自走式

カルティマ 標準 (自走) CRT-5 ミキ

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	グリーン	726915	00122-000568
	ピンク	726925	
42cm幅	ネイビー	727035	

●前輪：6インチ ●後輪：22インチ  
●サイズ：40cm幅/全幅55・座幅40・前座高43.5cm  
42cm幅/全幅57・座幅42・前座高43.5cm  
●重量：9.9kg  
●折りたたみ幅：32cm  
●シート奥行：38cm  
●最大使用者体重：100kg

●オプション  
エレベータリングユニット、ブラバックルベルト、  
ガートル掛け、杖入れ、ボンベ架、延長棒

非課税 **在庫限定**

多機能タイプ 自走式

ジターン 多機能 (自走) JTN-3 ミキ

商品コード	TAISコード
727755	00122-000633

●前輪：6インチ ●後輪：22インチ  
●サイズ：全幅59.5・座幅40cm  
前座高43.5cm  
●重量：14.2kg  
●折りたたみ幅：31cm  
●シート奥行：40cm  
●最大使用者体重：100kg

●オプション  
エレベータリングユニット、ブラバックルベルト、  
ガートル掛け、杖入れ、ボンベ架、延長棒

非課税 **在庫限定**

標準タイプ 自走式

ジターン 標準 (自走) JTN-1 ミキ

商品コード	TAISコード
727750	00122-000631

●前輪：6インチ ●後輪：22インチ  
●サイズ：全幅63.5・座幅40cm  
前座高43.5cm  
●重量：12.7kg  
●折りたたみ幅：32.5cm  
●シート奥行：40cm  
●最大使用者体重：100kg

●オプション  
エレベータリングユニット、ブラバックルベルト、  
ガートル掛け、杖入れ、ボンベ架、延長棒

非課税 **在庫限定**

多機能タイプ 自走式

NEO-1αW (自走式) 日進医療器

商品コード	TAISコード
727765	00175-000399

●前輪：6インチ ●後輪：22インチ  
●サイズ：全幅58・座幅40cm  
前座高43cm  
●重量：13.4kg  
●折りたたみ幅：32cm  
●シート奥行：40cm  
●最大使用者体重：100kg

●オプション  
ワンストップブレーキ、エレベータリングユニット、  
ブラバックルベルト、ガートル掛け、延長棒

非課税 **在庫限定**

標準タイプ 自走式

NEO-1α (自走式) 日進医療器

商品コード	TAISコード
727710	00175-000387

●前輪：6インチ ●後輪：22インチ  
●サイズ：全幅63・座幅40cm  
前座高43cm  
●重量：12.3kg  
●折りたたみ幅：32cm  
●シート奥行：40cm  
●最大使用者体重：100kg

●オプション  
ワンストップブレーキ、ブラバックルベルト、  
ガートル掛け、延長棒

非課税 **在庫限定**

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

多機能タイプ/幅狭タイプ

介助式

ULTRA 多機能(介助) NAH-U2W エアリー仕様 日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
38cm幅	インディゴ	728590	00175-000359
幅	ワイン	728605	
40cm幅	インディゴ	728595	00175-000357
幅	ワイン	728610	
42cm幅	インディゴ	728600	00175-000357
幅	ワイン	728615	



ノーバンク  
タイヤ

選べる  
シート色!

- 前輪:6インチ ●後輪:14インチ
- サイズ:全幅52・54・56・座幅38・40・42cm  
前座高42cm
- 重量:12.3kg ●折りたたみ幅:28cm
- シート奥行:38cm ●最大使用者体重:100kg

非課税  
在庫  
限定

●オプション  
ワンストップブレーキ、エレベーターユニット\*1、  
ブラバックルベルト、ガードル掛け、杖入れ、  
ブレーキ延長棒  
\*1...座幅38cmのみ車いす本体のフットサポートに交換が必要。

軽量タイプ/幅狭タイプ

介助式

ULTRA 標準(介助) NAH-U1 エアリー仕様 日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
38cm幅	インディゴ	728560	00175-000357
幅	ワイン	728575	
40cm幅	インディゴ	728565	00175-000357
幅	ワイン	728580	
42cm幅	インディゴ	728570	00175-000357
幅	ワイン	728585	



ノーバンク  
タイヤ

選べる  
シート色!

- 前輪:6インチ ●後輪:14インチ
- サイズ:全幅52・54・56・座幅38・40・42cm  
前座高42cm
- 重量:11kg ●折りたたみ幅:28cm
- シート奥行:38cm ●最大使用者体重:100kg

非課税  
在庫  
限定


●オプション  
ワンストップブレーキ、ブラバックルベルト、  
ガードル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

多機能タイプ【身長目安 155~170cm】 介助式

Galaxyアジャスト(介助) Gal-61 松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	728705	00066-000386

- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅55・座幅40・前座高41・43・45cm
- 重量:14.2kg ●折りたたみ幅:28cm
- シート奥行:38cm ●最大使用者体重:100kg

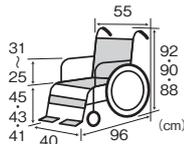

バックサポート強調整  
3D立体スリング

非課税  
在庫  
限定


ノーバンク  
タイヤ

軽量タイプ【身長目安 155~170cm】 介助式

Galaxy標準(介助) Gal-21 松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	728700	00066-000384

- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅54・座幅40・前座高43cm
- 重量:11.4kg ●折りたたみ幅:28cm
- シート奥行:38cm ●最大使用者体重:100kg

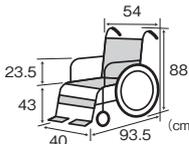

バックサポート強調整  
3D立体スリング

非課税  
在庫  
限定


ノーバンク  
タイヤ

低床多機能タイプ【身長目安 145~160cm】 介助式

Galaxyミニモ(介助) Gal-60 松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	728710	00066-000388

- 前輪:5インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅55・座幅40・前座高35・37cm
- 重量:14.2kg ●折りたたみ幅:27cm
- シート奥行:36cm ●最大使用者体重:100kg

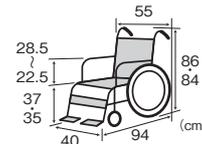

バックサポート強調整  
3D立体スリング

非課税  
在庫  
限定

ノーバンク  
タイヤ

多機能タイプ

介助式

ジターン 多機能(介助) JTN-4 ミキ

商品コード	TAISコード
728755	00122-000634

- 前輪:6インチ
- 後輪:16インチ
- サイズ:全幅54.5cm  
座幅40cm  
前座高46cm
- 重量:12.7kg
- 折りたたみ幅:25cm
- シート奥行:40cm
- 最大使用者体重:100kg

ヘザーブルー



ノーバンク  
タイヤ

在庫  
限定

非課税

標準タイプ

介助式

ジターン 標準(介助) JTN-2 ミキ

商品コード	TAISコード
728750	00122-000632

- 前輪:6インチ
- 後輪:16インチ
- サイズ:全幅58cm  
座幅40cm  
前座高46cm
- 重量:11.2kg
- 折りたたみ幅:24cm
- シート奥行:40cm
- 最大使用者体重:100kg

ヘザーブルー



ノーバンク  
タイヤ

在庫  
限定

非課税

多機能タイプ/幅狭タイプ

介助式

カルティマ 多機能(介助) CRT-8 ミキ

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	グリーン	728635	00122-000574
幅	ピンク	728645	
42cm幅	ネイビー	728695	

- 前輪:6インチ
- 後輪:14インチ
- サイズ:  
40cm幅/全幅49・座幅40cm  
42cm幅/全幅51・座幅42cm
- 前座高:43.5cm
- 重量:10.5kg
- 折りたたみ幅:25cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg



ノーバンク  
タイヤ

ネイビー  
(42cm幅)

在庫  
限定

非課税

軽量タイプ/幅狭タイプ

介助式

カルティマ 標準(介助) CRT-6 ミキ

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	グリーン	728630	00122-000570
幅	ピンク	728640	
42cm幅	ネイビー	728690	

- 前輪:6インチ
- 後輪:14インチ
- サイズ:  
40cm幅/全幅49・座幅40cm  
42cm幅/全幅51・座幅42cm
- 前座高:43.5cm
- 重量:9.1kg
- 折りたたみ幅:25cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg



ノーバンク  
タイヤ

ネイビー  
(42cm幅)

在庫  
限定

非課税

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

多機能タイプ

介助式

NEO-2αW (介助式)


日進医療器

商品コード	TAISコード
728765	00175-000400

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅53・座幅40cm  
前座高43cm
- 重量：12.8kg
- 折りたたみ幅：26cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

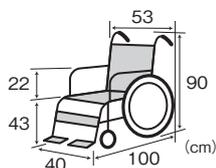

押し手90cmで  
らくらく介助の  
多機能タイプ

スイング  
イン・アウト  
ノーパンク  
タイヤ

非課税

在庫  
限定

- オプション  
ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、  
ブラバックルベルト、ガートル掛け、延長棒

標準タイプ

介助式

NEO-2α (介助式)


日進医療器

商品コード	TAISコード
728745	00175-000388

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅59・座幅40cm  
前座高43cm
- 重量：11.3kg
- 折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

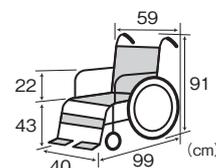

押し手91cmで  
らくらく介助!

ノーパンク  
タイヤ

非課税

在庫  
限定

- オプション  
ワンストップブレーキ、ブラバックルベルト、  
ガートル掛け、延長棒

リクライニング／ティルト

リクライニング・ティルト式

マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE

松永製作所

商品コード	TAISコード
730260	00066-000352


- 前輪：5インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅53・座幅40・前座高41cm
- 重量：29kg ●折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：35cm ●最大使用者体重：100kg

ティルト角度	0~25°
リクライニング	90~110°

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



狭いスペースでの  
移動もラクラク

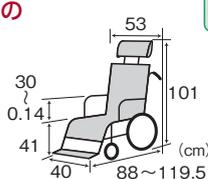

バックサポート張り調整  
3D立体スリリング

ノーパンク  
タイヤ

足踏み  
ブレーキ

問い合わせ  
商品

在庫  
限定

非課税

- オプション...ワンタッチプラスチックベルト

リクライニング／ティルト

リクライニング・ティルト式

マイチルト・グラン3D MH-GRL-SE

松永製作所

商品コード	TAISコード
730265	00066-000393


- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅62・座幅44・前座高47cm
- 重量：31.2kg ●シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ティルト角度	0~30°
リクライニング	95~130°

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



大柄な方も  
快適なサイズ

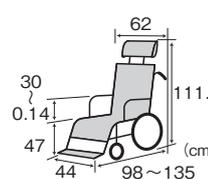

バックサポート張り調整  
3D立体スリリング

ノーパンク  
タイヤ

足踏み  
ブレーキ

問い合わせ  
商品

在庫  
限定

非課税

- オプション...ワンタッチプラスチックベルト

リクライニング／ティルト

リクライニング・ティルト式

ULTRA ティルト&リクライニング NAH-UC・Hi/Lo ノーパンク仕様

日進医療器

型式	商品コード	TAISコード
NAH-UC・Hi	730250	00175-000382
NAH-UC・Lo	730015	00175-000363

- 前輪：6インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：Hi / 全幅56・座幅42・前座高45cm  
Lo / 全幅54・座幅40・前座高40cm
- 重量：Hi / 19.7kg、Lo / 18.6kg
- 折りたたみ幅：Hi / 56cm、Lo / 54cm
- シート奥行：Hi / 38cm (最奥部42cm)  
Lo / 36cm (最奥部40cm)
- 最大使用者体重：Hi / 120kg、Lo / 100kg



NAH-UC・Hi  
(グリーン)




NAH-UC・Lo  
(インディゴ)

ノーパンク  
ハイポリマー  
タイヤ

3D シート	クッション 豪華装飾	スイング イン・アウト	アームサポート 高さ調整
足踏み ブレーキ	カバーク キャスター	アームサポート 落とし込み	アームサポート 跳ね上げ
アンカー フレーム	楽々介助 ブレーキ	フットレグサポート 着脱	フットレグサポート スイングアウト
		バックサポート 張り調整	バックサポート スイングアウト
		座シート 奥行調整	座シート 奥行調整

最大  
使用者体重  
120kg

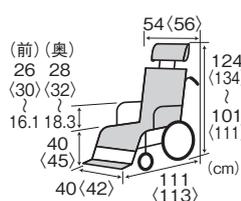

< >はHiの寸法です

ティルト角度	0~30°
リクライニング	90~120°

<NAH-UC・Hi>

非課税

在庫  
限定

<NAH-UC・Lo>

非課税

在庫  
限定

ティルト&  
リクライニングの操作が  
軽い力で可能に

- オプション...エレベーターユニット、ブラバックルベルト、ガートル掛け(専用)

専用オプション

ガートル掛け(専用)  
KF-9UC

商品コード	TAISコード
726900	00175-000384

- 長さ：88~158cm



※シート：専用シート(取替えはできません)

**フォーム**  
**レッツフロート** パラマウントベッド

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	KK-TC01M	762310	00170-001508
45cm幅	KK-TC01L	762315	00170-001509

●サイズ: KK-TC01M / 奥行38cm、KK-TC01L / 奥行40cm  
●材質: カバー/ ポリエステル・クロロプレンゴム・ポリウレタン  
中芯側地/ ポリエステル・ポリウレタン、中芯/ ポリウレタンフォーム

屋内 (A B C D E) 屋外 (A B C D E)

厚さ **5cm** 重量 40cm幅 **0.5kg** 45cm幅 **0.6kg**

レッツフロート 商品説明動画(LP)



車いすをお使いになる方へ、一枚の思いやり

**車椅子クッション**  
**レッツフロート**

姿勢が保ちやすい  
車いすクッションを使うことで、座面のたわみを軽減して、姿勢が保ちやすくなります。

スリングシートのみ骨盤と背骨が傾いてしまいがち  
レッツフロートを使用骨盤が安定しやすく自然な姿勢に

底付き感を抑える  
上層の「フロントクッション」はウレタンフォームを包み込んだシートタイプです。着座時の空気の排出を抑えることによるエアークッションとウレタンフォームとのハイブリッド効果により、底付き感を抑えた座り心地をもたらします。

骨盤の前滑りを抑える  
下層のウレタンフォームの後方に段差を設けることで、骨盤の前滑りを防ぎ、姿勢を保ちやすくしています。

足こぎしやすい  
下層の「ベースクッション」の前方先端を斜めにカットすることで、膝裏の圧迫感を軽減して、足を動かすしやすくしています。

座面にフィットしやすい  
カバー底面には滑りにくい防水性素材「ネオプレン」を採用。ベルトなどで固定する必要がなく置くだけで簡単に利用できます。

優れた通気性  
カバー上面には通気性にすぐれた素材「ダブルラセル」を使用。生地裏面には防水フィルムを貼って、汗や汚れの浸透を防ぎます。カバーは取り外して洗濯できます。

〈40cm幅〉 〈45cm幅〉

東京医療学院大学 保健医療学部  
リハビリテーション学科  
理学療法専攻 教授  
吉井 智晴

皆さんは車いすに最大何時間座ったことがありますか。数十分で腰が緩んだり、足が息苦なったりします。車いすのシートはスリングシートといい、簡易的な椅子と同じ原理のものが広く使われています。現在、私は大学で理学療法士を目指す学生を教えています。1年生に車いすの体験実習を行います。ちょっと触れただけの学習では、ユーザーの気持ちに近づけないからです。結果としては、ほぼ100%の学生が、お尻が痛い、と言います。そうなんです!

車いすはこのままでは座り心地が悪いだけでなく、痛みや疲労を引き起こします。痛みは人間の心身の行動を抑制します。だからこそ、心地よく座っていただく配慮をすることが、私たち専門職に求められています。

車いすの管理だけでなく大変なことに、クッションが加わることによる介護者の管理の手間が増えること、またそれに対するユーザーの家族への遠慮、消毒を含む掃除の手間、そもそもクッションは質沢品だという誤解など、様々な課題はありますが、まずは、私たち専門職の意識改革が必要ではないかと考えます。車いすにはクッションが当たり前に心地よい座りからアクティブな活動へ。

**エア**  
**エアークッション** ミキ

屋内	厚さ	重量
(A B C D E)	<b>3.5cm</b>	<b>0.3kg</b>

型式	商品コード	TAISコード
ALC-35-38	762240	00122-000626

●サイズ: 幅38×奥行38cm  
●材質(中身): ポリエステル・ポリウレタン

カバーを外した状態  
空気圧調整後

簡単! 空気圧調整ができる

※実際の商品カラーはブラックです。

**フォーム**  
**フォリオ** ケーブ

屋内	厚さ	重量
(A B C D E)	<b>6cm</b>	<b>0.6kg</b>

型式	商品コード	TAISコード
CK-405	762230	00206-000132

●サイズ: 幅40×奥行40cm ●材質(中身): ウレタンフォーム

抜群の通気性でムレを軽減  
二つ折り構造で収納や持ち運びにも便利

特殊スリット構造と、前後で硬度の異なるウレタン素材で、臀部を沈ませ、前ズレを防止します。

**フォーム**  
**Mold Air (モールドエア)** ビーエーエス

屋内	厚さ	重量
(A B C D E)	<b>2cm~10cm</b>	<b>0.84kg</b>

商品コード	TAISコード	抜群の体圧分散効果
762245	01250-000003	

●サイズ: 幅40×奥行42cm  
●材質(中身): ポリアロピレン

優れた分散力!  
抜群の通気性!

特殊素材 E-CORE

モールドエアなし  
モールドエアあり

4層構造でお尻が前にずれない。3次元立体的形状で姿勢をサポート。

**フォーム**  
**アルファプラ すくっとクッション** タイカ

屋内	厚さ	重量
(A B C D E)	<b>4.5cm</b>	<b>0.3kg</b>

型式	商品コード	TAISコード
SKTCA-4040	762295	00563-000142

●サイズ: 幅40×奥行40cm ●材質(中身): ポリウレタンフォーム

厚み4.5cmの薄型  
カバーは安心の制菌対策仕様 (SEK赤)

**フォーム**  
**アルファプラF クッション** タイカ

屋内	厚さ	重量
(A B C D E)	<b>7.5cm</b>	<b>0.6kg</b>

型式	商品コード	TAISコード
FWC-4040	762235	00563-000124

●サイズ: 幅40×奥行40cm ●材質(中身): ポリウレタンフォーム

前ズレを防ぐ  
ラジアルキャッチ™構造

(1層目) トップフォーム  
(2-3層目) ラジアルキャッチ™構造  
(4層目) ベースフォーム

2層目から4層目は接着されています。

**エア+ウレタン**  
**スタークッション・ステイビル** ラックヘルスケア

屋内	厚さ	重量
(A B C D E)	<b>7.5cm</b>	40cm幅 約 <b>1.6kg</b> 45cm幅 約 <b>1.7kg</b>

サイズ	商品コード	重量
40cm幅	762200	
45cm幅	762205	


●サイズ: 奥行39cm  
●材質(中身): 特殊ウレタンフォーム

エアとウレタンの素敵なお出逢い

エアの長所は優れた体圧分散性。ウレタンの長所は安定性。それぞれの長所がひとつになりました。

世界水準のハイクオリティクッション！ アクシオム日本上陸！

アクシオムクッション選定ポイント

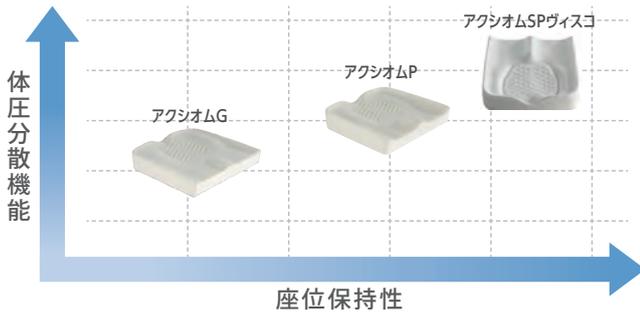

- AXIOM G: スタンダードタイプ
- AXIOM P: 座位保持特化タイプ
- AXIOM SP VISCOS: メディカルタイプ 一体圧分散&座位保持

キーモビリティテクノロジー

キーモビリティとは？

米国大手のリハビリ車椅子メーカーです。世界60ヶ国以上の地域で各製品が愛用されています。世界水準のブランドです。

アクシオムのご紹介！

アクシオムクッションは、快適性と安定性、耐久性に優れた高密度高級ウレタンフォームを使用しています。米国ジョージア工科大学の協力による人体計測学に基づいて開発された特殊形状技術は、座面圧力からくる臀部の痛みや姿勢崩れからご利用者様を守ります。

「ハニカム構造」+「特殊形状」により、長時間座位でも快適にご使用いただける製品です。

フォーム

アクシオムG

ユーキ・トレーディング

厚さ	重量
大腿部直下 6cm 側面 8cm	40cm幅用 0.88kg 45cm幅用 1.05kg

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm	XG1515	762265	00468-000061
45cm	XG1716	762270	00468-000062

- サイズ：40cm幅用/幅38×奥行38cm  
45cm幅用/幅43×奥行40cm
- 材質：中身/高密度ウレタンフォーム  
カバー/防水加工4WAYストレッチポリエステル

薄いクッションではお尻が痛くなる

ワイド 45cm

<40cm幅>



<45cm幅>



人体計測学形状  
座骨部の六角形構造は座骨を優しく包み支持面の増加をもたらし、圧分散効果を発揮します。特殊形状はあらゆる方向から身体をサポートし、抜群の安定性を提供します。

フォーム

アクシオムP

ユーキ・トレーディング

厚さ	重量
大腿部直下 6cm 側面 9cm	40cm幅用 0.94kg 45cm幅用 1.12kg

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm	XP1515	762275	00468-000063
45cm	XP1716	762280	00468-000064

- サイズ：40cm幅用/幅38×奥行38cm  
45cm幅用/幅43×奥行40cm
- 材質：中身/高密度ウレタンフォーム  
カバー/防水加工4WAYストレッチポリエステル

不安定な座位姿勢・姿勢崩れでお困りの方へ

ワイド 45cm

<40cm幅>



<45cm幅>



座位保持特化モデル  
シリーズで共通している人体計測学のデータをより集約した特殊形状は骨盤、大腿部をしっかりサポートし、姿勢の安定をもたらします。

フォーム

アクシオムSPヴィスコ

ユーキ・トレーディング

厚さ	重量
大腿部直下 8.5cm 側面 11.5cm	40cm幅用 1.36kg 45cm幅用 1.67kg

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm	XSP1515V	762285	00468-000065
45cm	XSP1716V	762290	00468-000066

- サイズ：40cm幅用/幅38×奥行38cm  
45cm幅用/幅43×奥行40cm
- 材質：中身/高密度ウレタン+低反発ウレタン  
アウターカバー/スーパー4WAYストレッチポリエステル  
インナーカバー/防水加工4WAYストレッチポリエステル

座位時間が長い方・床ずれリスクが高い方へ

ワイド 45cm

<40cm幅>



<45cm幅>



無調整の高機能クッション  
ハイレベルな「体圧分散力」と「座位保持力」、「快適性」を兼ね備えたシリーズ最高峰モデル。調整に悩まされることなく、適切な効果を得られます。

ピース+パイプ

M-able クッション 清拭タイプ

ヒトラボ

型式	商品コード	TAISコード
MC-M2	762300	01908-000027
MC-C1	762305	01908-000018
MC-T	762259	01908-000037
MC-TL	762405	01908-000044

- サイズ：MC-M2/22×40cm、MC-C1/37×100cm  
MC-T/55×75cm、MC-TL/65×85cm
- 材質：中材/ポリプロピレン・ポリエチレン  
※MC-M2はポリエチレンのみ  
MC-T・MC-TLはポリプロピレンのみ  
内カバー/ナイロン・ポリウレタン  
外カバー/ポリエステル・綿




車いすの姿勢を整えたい方におすすめです


重量
MC-M2 2kg MC-C1 1kg MC-T 0.45kg MC-TL 0.77kg



<MC-M2>

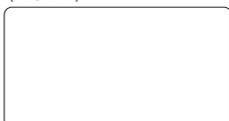


<MC-C1>

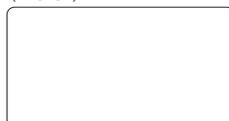

<MC-T>



<MC-TL>

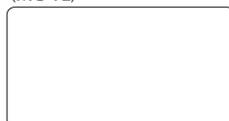

MC-T

T (TL) 使用方法動画



**M2タイプ使用例**  
車いす上で、大腿部の上に置いて使います。前方に支持面ができて、クッションの上に腕を乗せることで前傾姿勢を促し、骨盤を立て、座姿勢が崩れるのを防ぎます。円背の方、体幹が不安定な方、骨盤の後傾によって前ズレ姿勢になりやすい方におすすめです。

**C1タイプ使用例**  
背中から肩、腕を支えることにより、座位姿勢の崩れを防ぎます。ループで車いすに固定することにより、クッションがずり落ちずに安定して使えます。

**Tタイプ使用例**  
車いすのエレベーターリングなどにベルトで装着すると、足をソフトに支えて体圧分散と安楽を促します。

**TLタイプ使用例**  
従来のTタイプの大きなサイズで、足の長い方や太い方、むくみがある方、O脚の方でも脚を広くゆとりと受け止めます。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位交換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排糞装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

購入品(入浴)

購入品(排泄)

購入品(入浴)

座り続けられる3大要素:安定性・分散性・流動性



高い方	アウル CARE 75F		アウル CARE 100C
	アウル CARE 60F	アウル CARE 70C	アウル CARE 80C
	アウル CARE 40F		
床ずれリスク	座位を保つことが出来る方		前ズレしやすい方
低い方			座位が保てず、大腿部支持が必要な方

●座り続けられない(姿勢崩れを起こしやすい)要因例

- ・着座面がフワフワする → 疲れて前ズレが起きやすい
- ・お尻が痛くなる → 痛みを避けてお尻を前にずらしやすい
- ・動けない → 皮膚が突っ張り辛くなりやすい
- ・ひざ裏が気になる → お尻を前にずらしやすい
- ・大腿部が開きやすい → 骨盤後傾になりやすい

思い当たれば、  
見てみよう!



●製品特長(“ふくろう”の進化ポイント)

**アウル・ライン**  
身体に沿った形状で前後の誤使用を防止し、車いすフレームの干渉を防ぎます。

**アウル・アイ**  
おしりにフィットする形状で、最も圧力のかかる坐骨部を包み込むようなサポート性を強化。

**アウル・スリット**  
深さと長さを増したスリットを設け、尾骨から仙骨にかけての圧力を軽減。

**アウル・ステップ**  
前側のベースウレタンを柔らかくし、ひざ裏のあたりを和らげ足つき性もアップ。

前端部形状により、ひざ裏部の奥行は40cm未満なので、小柄な方でもひざ裏の干渉を防ぎます。

ジェル

アウル CARE 40F 加地

屋内	A B C D E	厚さ	4cm	重量	40cm幅 約1.1kg 44cm幅 約1.2kg
屋外	A B C D E				

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL40F-BK1-4040	762345	00540-000067
44cm幅	OWL40FW-BK1-4440	762375	00540-000073

- サイズ: 40cm幅 / 幅40×奥行40cm、44cm幅 / 幅44×奥行40cm
- 材質: 中身 / エクスジェル・ウレタンフォーム  
カバー / 簡易防水ポリエステルカバー

<40cm幅>

本体

<44cm幅>

カバー

ワイド 44cm

ジェル

アウル CARE 60F 加地

屋内	A B C D E	厚さ	6cm	重量	40cm幅 約1.2kg 44cm幅 約1.3kg
屋外	A B C D E				

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL60F-BK1-4040	762350	00540-000068
44cm幅	OWL60FW-BK1-4440	762380	00540-000074

- サイズ: 40cm幅 / 幅40×奥行40cm、44cm幅 / 幅44×奥行40cm
- 材質: 中身 / エクスジェル・ウレタンフォーム  
カバー / 簡易防水ポリエステルカバー

<40cm幅>

本体

<44cm幅>

カバー

ワイド 44cm

ジェル

アウル CARE 75F 加地

屋内	A B C D E	厚さ	7.5cm	重量	40cm幅 約1.4kg 44cm幅 約1.5kg
屋外	A B C D E				

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL75F-BK1-4040	762355	00540-000069
44cm幅	OWL75FW-BK1-4440	762385	00540-000075

- サイズ: 40cm幅 / 幅40×奥行40cm、44cm幅 / 幅44×奥行40cm
- 材質: 中身 / エクスジェル・ウレタンフォーム  
カバー / 簡易防水ポリエステルカバー

<40cm幅>

本体

<44cm幅>

カバー

ワイド 44cm

ジェル

アウル CARE 70C 加地

屋内	A B C D E	厚さ	7cm	重量	40cm幅 約1.2kg 44cm幅 約1.4kg
屋外	A B C D E				

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL70C-BK1-4040	762360	00540-000070
44cm幅	OWL70CW-BK1-4440	762390	00540-000076

- サイズ: 40cm幅 / 幅40×奥行40cm、44cm幅 / 幅44×奥行40cm
- 材質: 中身 / エクスジェル・ウレタンフォーム  
カバー / 簡易防水ポリエステルカバー

<40cm幅>

本体

<44cm幅>

カバー

ワイド 44cm

ジェル

アウル CARE 80C 加地

屋内	A B C D E	厚さ	8cm	重量	40cm幅 約1.6kg 44cm幅 約1.7kg
屋外	A B C D E				

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL80C-BK1-4040	762365	00540-000071
44cm幅	OWL80CW-BK1-4440	762395	00540-000077

- サイズ: 40cm幅 / 幅40×奥行40cm、44cm幅 / 幅44×奥行40cm
- 材質: 中身 / エクスジェル・ウレタンフォーム  
カバー / 簡易防水ポリエステルカバー

<40cm幅>

本体

<44cm幅>

カバー

ワイド 44cm

ジェル

アウル CARE 100C 加地

屋内	A B C D E	厚さ	10cm	重量	40cm幅 約1.6kg 44cm幅 約1.8kg
屋外	A B C D E				

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	OWL100C-BK1-4040	762370	00540-000072
44cm幅	OWL100CW-BK1-4440	762400	00540-000078

- サイズ: 40cm幅 / 幅40×奥行40cm、44cm幅 / 幅44×奥行40cm
- 材質: 中身 / エクスジェル・ウレタンフォーム  
カバー / 簡易防水ポリエステルカバー

<40cm幅>

本体

<44cm幅>

カバー

ワイド 44cm